

# Ophængsstativ til spilerdug



**Vejledning i opsætning og brug**

## Opsætning af ophængsstativ



Med i kassen følger: 4 franske skruer, 4 skiver og 4 ravplugs til brug ved opsætning af ophængsstativet.

Desuden 3 blindpropper samt en sakseholder på prop, der kan sættes i et af de 4 huller på stativet.

Stativet kan fås til 1, 2 og 3 ruller og kan monteres både lodret og vandret ud fra, hvad der passer bedst på den enkelte arbejdsplads. Hæng stativet i en højde der gør det let **for alle** at sætte en rulle på, fjerne en tom samt klippe af




Lodret position




Ophæng med 2 ruller monteret vandret

## Montering af spilerdugsrulle på ophængsstativ

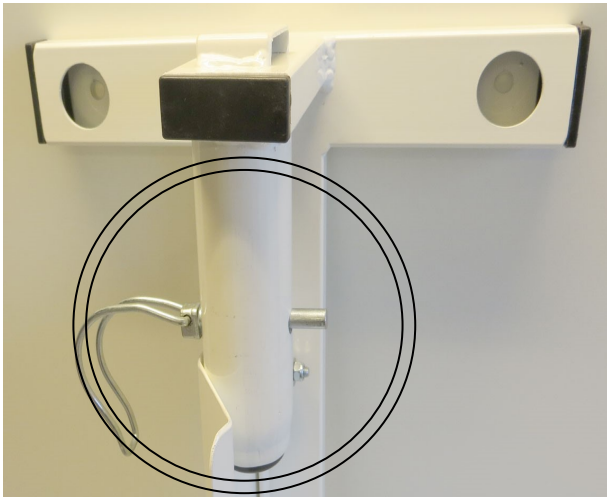


Start med at åbne og fjerne låsesplitten (som holder spilerdugsrullen på plads, når den er sat på ophængsstativet).

*Spilerdugen monteres først når ophængsstativet er opsat på væg.*

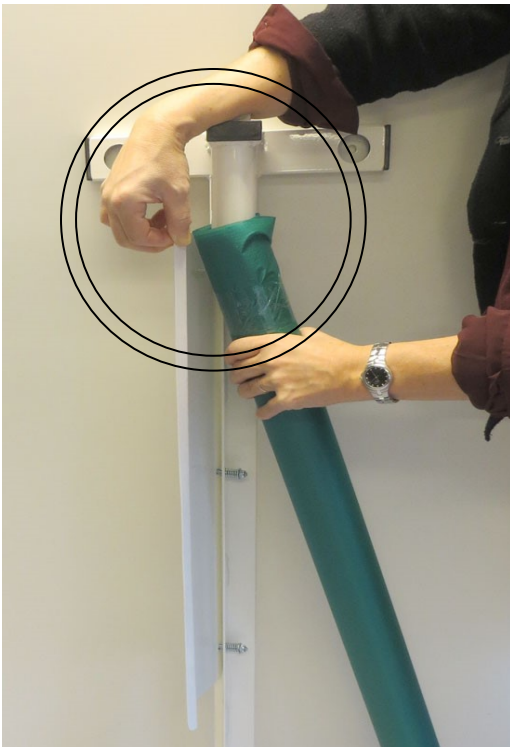

Hold ud i klemmen og sæt først rullen på tappen foroven.

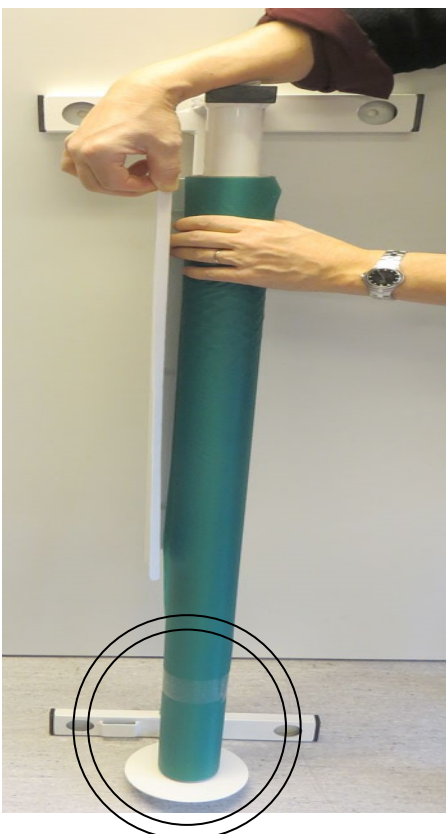

Sæt derefter rullen ned over tappen forned.

Sæt låsesplitten på og lås den igen.

Først nu fjernes tapen fra spilerdugsrullen.



Træk ud i spilerdugen og klip den ønskede længde af.



Her ses det tæt på.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.



***Brehms Spilerdug ApS***

***Tlf.: 57648351– E-mail: [info@spilerdug.dk](mailto:info@spilerdug.dk) – [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk)***