

ProSense

Benfixering för urinpåse "LegFix"

Fixeringsfickan passar alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden, både tömbara och slutna urinpåsar. Passar för både vänster eller höger ben, samt underben. För fixering på underben (vaden), välj en mindre storlek. Storleksmarkering visas med färgade trådar (se nr.1). Material i elastiskt garn vilket ger en flexibel och bra passform.



Benämning:	ProSense Benfixering för urinpåse	
Varumärke:	ProSense LegFix	
Storlek XS:	Art.nr:	55000
Storlek S:	Art.nr:	55001
Storlek M:	Art.nr:	55002
Storlek L:	Art.nr:	55003
Storlek XL:	Art.nr:	55004
Storlek XXL:	Art.nr:	55005
Färgkod storlek XS, Benöppning (cm)	● Röd	20-30
Färgkod storlek S, Benöppning (cm)	● Gul	24-39
Färgkod storlek M, Benöppning (cm)	● Blå	36-55
Färgkod storlek L, Benöppning (cm)	● Brun	40-70
Färgkod storlek XL, Benöppning (cm)	● Grön	65-95
Färgkod storlek XXL, Benöppning (cm)	○ Vit	75-105
Material:	76% Polyamid, 24% Elastan	
Antal / frp:	3 st	
Antal / Transport frp:	150 st (3x50 st)	
Produktinformation:	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning, förvaras i rumstemperatur, produkten innehåller ingen PVC eller Latex.	
Tvättråd:		
Antal tvättar:	ca. 25 st	
Användning och bruksanvisning:	För att urinpåsen ska sitta tryggt och säkert, även när påsen är full är det viktigt att välja rätt storlek på benfixeringen. Storleken mäts runt låret alternativt underbenet (vaden). Urinpåsen träds ned i benfixeringens ovkant med avriningsröret ut genom öppningen i fixeringens nedkant. (se bild nr 2)	



Se till att sömmar och material är hela och felfria. Vid tecken på slitage och fel ska produkten kasseras. Placera ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål som avger hög värme. Vid allvarliga fel kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37
355 72 Ingelstad



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37 | 355 72 Ingelstad
Support 0703-320 737 | info@prosense.se
www.ProSense.se