


Endast ett rent sår läker!

- För en skonsam och effektiv rengöring

Debrisoft® Pad ger dig möjlighet att enkelt göra rent sår där rengöring med skarpa instrument inte är möjlig! Med dynan får du effektivt bort både biofilm och fibrin från sårbedden för en optimerad läkning.



fibre technology
ACTITOP

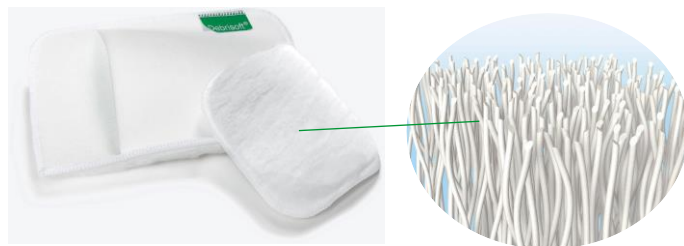

Miljoner och en fördelar

Dynan på **Debrisoft® Pad** består av monofilamenta fibrer med den unika Actitop-teknologin. De kanylformade topparna lyfter effektivt död vävnad från sårbedden.

Baksidan utgör en bekväm ficka för bättre grepp och hantering.

Ett snabbt resultat



- Sparar tid och pengar
- Gör rent såret på **2-4** minuter
- Effektiv mot biofilm

Enkel att använda





- Dynan är intuitiv att använda
- 95% värderar den som mycket bra eller excellent

Närmast smärtfri



- För en bättre följsamhet
- 97,4% upplever ingen smärta eller andra obehag

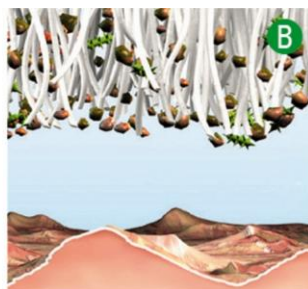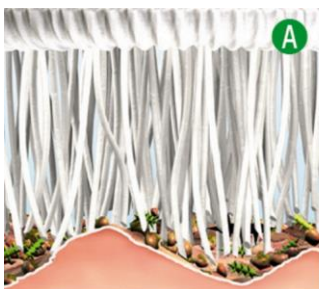

Indikationer (A)

- Tryckskador
- Bensår
- Diabetiska fotsår
- Hyperkeratos

Observera att dynan även är avsedd att användas till dermatologiska problem som t ex acne och psoriasis.

Funktion (B)

De patenterade fibertrådarna avlägsnar debris och exsudat från såret genom att binda smutsen och vätskan till sig. Det ger en skonsam och effektiv rengöring av såret



Användaranvisning

- Fukta dynan med vanligt vatten eller koksalt (kan även användas med Prontosanvätska), enligt lokala rutiner för omläggning och skaka av överflödigt vätska.
- Använd den mjuka fibersidan mot sårytan för att med ett lätt tryck göra debridera såret.
- Vid behov kan ytterligare en Debrisoft® Pad användas för att rengöra huden runt såret.
- Efter debridering läggs såret om enligt aktuell omläggningsordination och lokala rutiner

Försiktighetsåtgärder

- Låt inte Debrisoft® Pad sitta kvar i såret. Dynan är inget sårförband
- Dynan är endast för engångsbruk
- Dynan ska inte användas efter att såret blivit rött eller vaskulariserats
- Debrisoft® Pad ska inte klippas eller jämnas till
- Debrisoft® Pad ska inte användas till patienter med känd allergi mot någon av produktens beståndsdelar



Debrisoft® Pad finns i två storlekar

Storlek	Lev.art.nr.	Avd.fp	Trp.fp
10x10 cm	34 321	5	50
13x20	34 323	5	50

Produktmaterial

- Fibersidan består av monofilamenta polyesterfibrer
- Insida och baksida består av polyakrylat
- Produkten är latexfri
- Produkten är separat förpackad och EO-steriliserad

Debrisoft® Pad

- är CE-märkt
- förvaras torrt och rent i rumstemperatur
- är hållbar i 5 år från produktionsdatum
- har en förpackning av cellulosa, polyester och polypropylen
- har en avdelningsförpackning av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- kommer i en transportkartong i wellpapp av cellulosa vilken källsorteras som kartong
- produkten hanteras som brännbart avfall