



Absorberande förband för kontinent stomi

Mestopore är ett självhäftande absorberande förband för kontinent stomi.



- Virus- och bakterietät baksida skyddar mot kontamination (godkänd enligt Viral Penetration Test ASTM F1671)

Absorptionsdyna

- Superabsorberande polyakrylat för extra säkerhet
- Inget fibersläpp

Nonwovenfilm


- Vätsketät
- Ångpermeabel

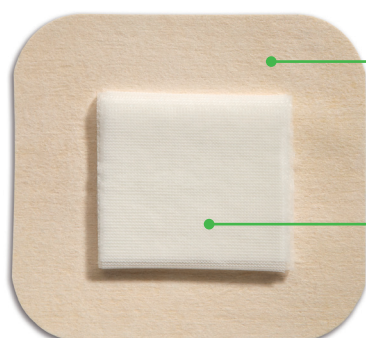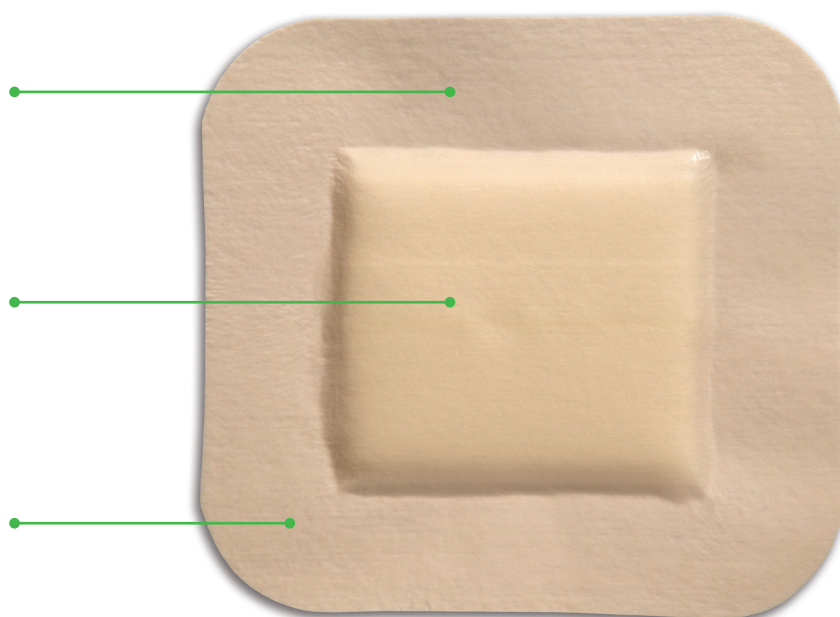


Vattenbaserad polyakrylathäfta för hudvänlig och säker fixering.

Icke-vidhäftande polyamidnät för bättre komfort


Så här används Mestopore®

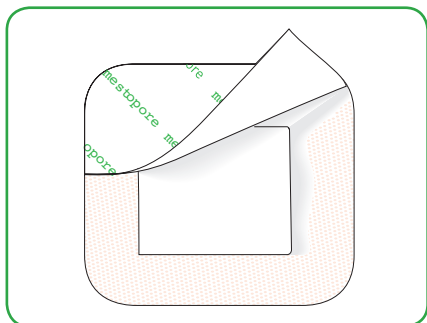

Ta bort skyddspappret från övre halvan av Mestopore.

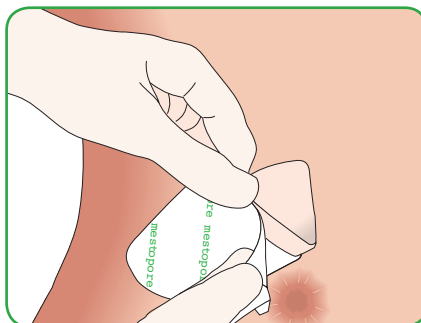

Applicera förbandet försiktigt mot huden över stomin. Ta bort det nedre skyddspappret och sätt fast resten av förbandet.

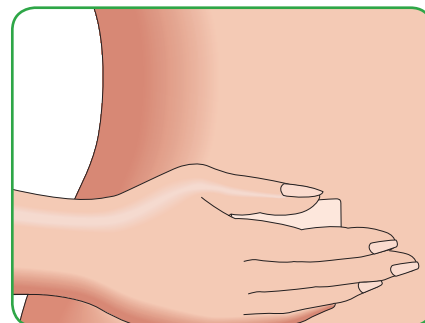

För att ta bort förbandet – lyft försiktigt från sida till sida.

Så här fungerar Mestopore

Mestopore är ett självhäftande förband för kontinent stomi. En icke-vidhäftande kontaktyta skyddar stomin från skada. Avsöndringen från stomin absorberas av högabsorberande svällande fibrer. Den självhäftande kanten förhindrar läckage och är hudvänlig även vid upprepade förbandsbyten. Nonwovenfilmen på ovansidan har en diskret beige färg och låter huden andas.

Fördelar med Mestopore

- Hudvänlig häfta
- Följsam
- Duschbar
- Lämnar inga rester
- Enkel att använda

Användningsområden

Mestopore är speciellt utvecklad för att användas på patienter med kontinent stomi.

Observera

Vid kliniska tecken på hudirritation rådgör med sjukvårdspersonal för lämplig behandling.

Mestopore sortiment

(levereras osterila, enstycksförpackade)

Art nr	Apotekets varunr.	Storlek	Storlek sårdyna	Avd fp	Transp fp
665000	256743	9 x 10 cm	5 x 5,5 cm	20	160



Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon 031-722 30 00
www.molnlycke.se

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.

