

# Kapslar in. Håller ihop.

- Exufiber® är ett gelbildande fiberförband tillverkat av Polyvinylalkohol (PVA) där fibrerna omvandlas till en gel vid kontakt med sårvätska
- Mjukt och formbart, anpassar sig till sårbedden
- Hög hållfasthet gör att förbandet enkelt kan tas bort i ett stycke<sup>1,2,3</sup>
- Absorberar och kapslar in sårvätska, blod och bakterier<sup>1,2,4</sup>
- Hög kapacitet att kapsla in<sup>1,5</sup> sårvätskan vilket minskar risken för läckage maceration<sup>1,2,4</sup>
- Håller kvar sårvätskan effektivt<sup>2</sup> och du kan tryggt lämna förbandet på plats\* och låta läkningen pågå ostört

\*I upp till sju dagar, 14 dagar på tagställen

## Håller ihop<sup>1,2,3</sup>

- Förbandet kan enkelt avlägsnas i ett stycke
- Minskar risken att rester och fibrer lämnas kvar i såret

## Förband av polyvinylalkohol (PVA) med patenterad Hydrolock® teknologi

- Hög absorption, även under kompression<sup>1,2,4,7</sup>
- Mjukt och bekvämt, enkelt att applicera<sup>2</sup>
- Kapslar in sårvätskan så att risken för läckage och maceration minimeras<sup>1,2,4</sup>
- Kan sitta på plats i upp till sju dagar och upp till 14 dagar på tagställen<sup>6</sup>

## Kapslar in<sup>1,2,4,5</sup>

- Minskar risken för läckage
- Minskar risken för maceration
- Absorberar och kapslar in sårvätska, bakterier och blod

Exufiber®

Med Hydrolock® teknologi

  
Mölnlycke®

## Kapslar in sårvätskan så att risken för läckage och maceration minskar

Exufiber® tillverkas med Hydrolock® teknologi för att både absorbera sårvätska och hålla den inkapslad i fibrerna mer effektivt än andra gelbildande fiberförband\*. Exufiber® minskar risken för läckage och maceration och bidrar till att skapa en optimal läkningsmiljö.

## Håller ihop för ren och enkel avlägsning i ett stycke

Hydrolock® teknologin innebär även att Exufiber® håller ihop när det är vått utan att behöva ytterligare förstärkning. Därför är förbandet enkelt att ta bort i ett stycke vid<sup>1,2,3</sup>.

## Mjuk anpassning efter kroppens konturer för ökad bekvämlighet

Förbandet är utvecklat för att anpassa sig mjukt till sårbädden<sup>2</sup> både när det är vått och torrt. Därför är det enkelt att applicera och bekvämt för patienten.

## Anmärkningar

Exufiber® ska användas under överinseende av kvalificerad vårdpersonal. Alla sår ska inspekteras ofta. Exufiber® är inte avsett för torra sår eller för fullhudsbrännskador. Om förbandet torkar och är svårt att avlägsna bör det vätas enligt klinisk praxis och vara blötlagt tills det enkelt går lätt att ta bort. Det kan ta flera minuter för Exufiber® att omvandlas till en gel.

Ta bort förbandet genom varsam rengöring/sköljning.

\*Vid jämförelse av laboratorieresultat för fukthållning under tryck med Aquacel®, Aquacel® Extra™-, Durafiber®- och UrgoClean®-förband


## Så här används Exufiber®



1. Förbered såret enligt lokala riktlinjer.



2. Applicera ett torrt Exufiber®-förband på såret. Packa djupa sår eller sår med kaviteter löst så att det finns utrymme för förbandet att svälla. Kontrollera att förbandet täcker hela såret. Överlappa den torra omkringliggande huden med minst 1–2cm för mindre storlekar och 5cm för större storlekar. Förbandet krymper när det suger upp sårvätska och börjar omvandlas till gel.

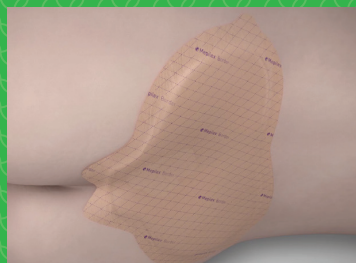

3. Fixera med ett ytterförband. Kompressionsbehandling kan användas tillsammans med Exufiber®.

## Sortiment (sterilförpackat)

Art. nr.	Storlek (cm)	Avd fp	Trp fp
709900	5 x 5	10	40
709901	10 x 10	10	80
709903	15 x 15	10	60
709905	4.5 x 10	10	40
709906	4.5 x 20	10	50
709907	4.5 x 30	10	60
709904	20 x 30	5	25
709908	1 x 45	5	25
709909	2 x 45	5	25

**Referenser:** 1. Chadwick P, McCardle J. Open, non-comparative, multicenter post clinical study of the performance and safety of a gelling fibre wound dressing on diabetic foot ulcers. Journal of Wound Care 2016; 25(4): 290-30. 2. Smet, S., Beele, H., Saine, L., Suys, E., Henrickx, B. Open, non-comparative, multi-centre post market clinical follow-up investigation to evaluate performance and safety on pressure ulcers when using a gelling fibre dressing as intended. Poster Presentation at European Pressure Ulcer Advisory Panel Conference, 2015, Ghent, Belgium. 3. Swerea IVF/Mölnlycke Health Care. Report 20140820-003 [unpublished]. Arkivdata. 2014. 4. Mölnlycke Health Care. Exufiber. Gesellschaft für Versorgungskonzepte in der Wundbehandlung (GVW) mbH, Stuttgart, Germany. Arkivdata [unpublished report, 2017]. 5. Mölnlycke Health Care. Report 20140806-001 [unpublished]. Arkivdata. 2014. 6. Mölnlycke Health Care. Report 20160921-006 [unpublished]. Arkivdata. 2016. 7. Mölnlycke Health Care. Report 20140805-001 [unpublished]. Arkivdata. 2014.

## Användningsområden

Exufiber® är avsedd för att användas på ett flertal vätskande sår:

- Ben- och fotsår
- Trycksår
- Delhudsbrännskador
- Kirurgiska sår
- Tagställen
- Maligna sår



## Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel + 46 31 722 30 00.

Mölnlycke-, Hydrolock- och Exufiber-varumärkena, -namnen och -logotyperna är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2019 Mölnlycke Health Care. Med ensamrätt. HQIM000656

Aquacel och Aquacel Extra är registrerade varumärken som tillhör ConvaTec, Inc. Durafiber är ett registrerat varumärke som tillhör Smith & Nephew. UrgoClean är ett registrerat varumärke som tillhör Urgo Medical.

  
**Mölnlycke®**