



Teleflex EZ-IO Produktblad

EZ-IO nålar och EZ-IO borr

IO-Intraosseös infart via benmärgen ska övervägas tidigt vid behov av akut venaccess hos både barn och vuxna tex vid hjärtstopp och där övrig vaskulär tillgång inte kan fastställas. Vid IO kan du ge alla sorters läkemedel (ej Cytostatika), blod, plasma och vätska. Nålen är röntgen- och kontrastsäker.

- Säker.** <1% allvarliga komplikationer.
- Snabb.** En infart på några sekunder.
- Effektiv.** 97% lyckas vid första försöket.

4 olika appliceringsställen: Humerus, distala femur (endast barn), proximala tibia och distala tibia.

De 2 vanligaste appliceringsställen är:

Humerus: Flödesmängd ca 6,3 L/timme
Tibia: Flödesmängd ca 1 L/timme

Borren

Ett batteridrivet borrhandslag.
V9058 EZ-IO G3 Power Driver

Nålar

Nålen har 3 olika längder med samma lumen.
Välj nål efter vävnadsdjup, ej efter vikt.

- 9018P-NO-005** EZ-IO Plus, 15 mm barn-nål (röd) plus Stabilizer/5-pack
- 9001P-NO-005** EZ-IO Plus, 25 mm vuxen-nål (blå) plus Stabilizer/5-pack
- 9079P-NO-005** EZ-IO Plus, 45 mm lång vuxen-nål (gul) plus Stabilizer/5-pack
- V9066-5** Endast Stabilizers/ 5-pack

