

Hans Rudolph, 6500 series V2mask, En patients

Helmask för Icke-Invasiv Ventilation (NIV) för konventionell ventilator med dubbelslangsystem, 22 mm ID
Med storlekarna Large, Medium, Small, Extra Small, Petite



Produkt egenskaper

- Med 5 storlekar för att klara de flesta patienter. – **6500 V2mask™** serien kan **anslutas till alla ventilatorer** som har inbyggda säkerhetsventiler för utandningsluften. (Dessa ventilatorer är konstruerade, utrustade och registrerade för att arbeta i icke-invasiv ventilationslägen).
- Maskdelen har en ny tätningsslans runt ansiktet och är i ett enda stycke, mask görs av klart mjukt termoplastisk elastomer.
- Anatomiskt formad maskkudde design med ett inbyggt hakstöd samt med ett räfflat stöd för en läckagefri och komfortabel passform.
- Dubbel 360° svivelport i 22 mm i innerdiameter detta möjliggöra förbättrad patientsäkerhet och rörelsefrihet som har en genomskinlig grön färgkod och enklare anslutning till slangsystem och ventiler.
- Maskhållaren har 4 remmar och är lätt att justera, har låg vikt. Detta ger en ökad patient komfort, finns i tre storlekar.
- Bekvämt **“Quick-release”** med låsclips för snabb och enkel montering & demontering av maskhållaren.
- Hög kvalitets masken & maskhållare som är lätt och enkel att använda.
- En enpatientsmask till en låg kostnad




SPECIFIKATIONER

Material (se fig. A)	
Ansiktsmask med förstärkande delar	Termoplastisk elastomer, polykarbonat termoplast
Svivel port - mask tillpassare, knärör, 22 mm port	Polykarbonat termoplast, genomskinlig grön
Maskhållare	Polyuretanskum svart, nylon UBL svart och blå
Maskhållarhake	Nylon, svart
Maskhållarspänne (4 st)	Polypropylen, svart

ALLMÄN INFORMATION


- **Användningsområde:** 6500 V2masks™ är en enpatients, multi-patient, vuxna oro-nasal mask som syftar till att ge ett bra användargränssnitt för patienten tillämpning för icke-invasiv ventilation. Masken ska användas som ett tillbehör till ventilatorer med kontinuerlig drift och som har tillräckliga larm- och säkerhetssystem för ventilator misslyckande.
- **Indikationer för användning och miljö:** Masken är specifikt avsedd för användning på vuxna patienter (mer än 30 kg vikt) för att administrera ventilation med positivt tryck för behandling av andningssvikt eller respiratorisk insufficiens. De är avsedda att användas på patienter som är lämpliga kandidater för icke-invasiv ventilation, i hemmet, sjukhus eller andra kliniska inställningarna med individer som har fått minst minimala instruktioner eller utbildning i användningen av maskerna samt på enheten och systemet som de är tänkta att ansluta.
- **Försiktighetsåtgärder:**
A.) Med den federala lagstiftningen får denna produkt endast säljas av eller på order av en läkare.
B.) Patienter med ansiktshår, speciellt skägg, kan uppleva maskläckage något som kan kräva att man måste raka bort håret.
- **Varning:** Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, levereras med produkten.
- **Kontraindikationer och komplikationer:** Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, levereras med produkten.

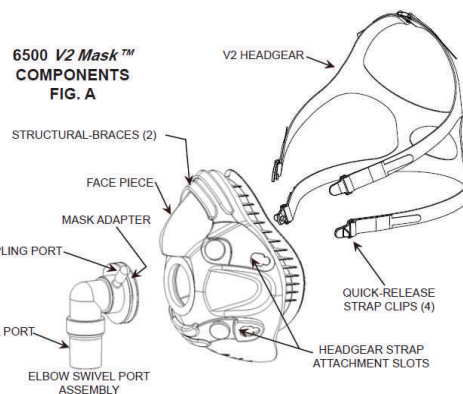

FYSISKA DATA

Maskens dimensioner

Mask storlek med dimensionerna - inches (mm)	Knärör med svivel		
	A	B	C
Large	5.9 (150)	4.2 (107)	4.71 (120)
Medium	5.5 (140)	4.16 (105)	4.46 (113)
Small	5.2 (132)	4.05 (103)	4.31 (109)
X-Small	4.8 (122)	3.95 (100)	4.21 (107)
Petite	4.6 (117)	3.9 (99)	4.05 (103)

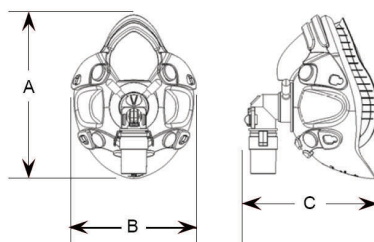

Maskens deadspace volymen (ml) med 22 mm ID knärör svivel port				
Large	Medium	Small	Extra Small	Petite
169	151	125	114	104

HANS RUDOLPH, INC.
HRI
www.rudolphinc.com

MASK SIZING GAUGE

For Hans Rudolph, Inc. Oro-nasal V2mask™ and V2mask™ Series Face Masks

PETITE
EXTRA-SMALL
SMALL
MEDIUM
LARGE

HANS RUDOLPH, Inc.
150 9001 150 13485
14, 0110 402704 USA & CANADA 800-854-6845
14, 0110 402704 Small 800-854-6845
14, 0110 402704 Large 800-854-6845
14, 0110 402704 Extra Small 800-854-6845

CE

MADE IN USA
©2010 Hans Rudolph, Inc.

If between sizes, we recommend you use the smaller size.

BESTÄLLNINGS INFORMATION - 6500 Series enpatients V2 Oro-Nasal mask med standardknärör svivel port och 22mm anslutning, innerdiameter (ID) för ventilatorer med inbyggd säkerhetsventil och maskhållare



	Mask, ingen AAV, inte ventilerad 22 mm ID knärör med Maskhållare
114501	6500 Large, 18 masker per förpackning
114502	6500 Medium, 18 masker per förpackning
114503	6500 Small, 18 masker per förpackning
114504	6500 Extra Small, 18 masker per förpackning
114505	6500 Petite, 18 masker per förpackning

	Mask, ingen AAV, inte ventilerad 22 mm ID knärör med Maskhållare
113530	6500 Large
113531	6500 Medium
113532	6500 Small
113533	6500 Extra Small
113534	6500 Petite

	Tillbehör
691143	Mask Sizing Gauge för V2 Oro-Nasal mask
669353/5	Metroseal, sond/katetertätning, engångs, 5 pack

