

# CM TraumaCover™

CM ProLine



Enkel och snabb fixation av huvudet.



Varje set levereras komplett med fastsvetsad huvudfixation.



- ✓ VÄRMANDE
- ✓ HYGIENISKT
- ✓ TIDSBESPARANDE
- ✓ SÄKER  
IMMOBILISERING

## PRODUKTINFORMATION:

CM TraumaCover är ett engångsöverdrag för traumamadrasser. I förpackningen ingår överdrag, två hak-pannbånd samt fixationskudde för huvudet. Materialet är miljövänligt och består av polyuretan och polyester. Överdraget är helt vätsketätt. Materialegenskaperna minimerar patientens värmeförlust. Starkt, tål lyft av patient. Enkel och snabb immobilisering av huvudet med polyeterkudde och hak-pannbånd. Huvudfixationen är integrerad med överdraget med vätsketät svetsning. Kudden fästes med kardborre direkt mot överdraget.  
Mått: Längd: 225 cm  
Bredd: 162 cm.

Art.nr: CMCOVER  
Namn: CM TraumaCover  
Engångsöverdrag.  
Levereras i 15-pack.



## ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Hjalmar Brantings väg 11G  
261 43 Landskrona  
Tel: 0733 10 90 20  
070 681 51 41

Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

COMFORT medical

# BRUKSANVISNING CM TRAUMA COVER



1. Trä överdraget över huvuddelen på traumamadrassen. Sträck från fotändan.



2. Spänn kardborrebanden hårt runt madrassen.



3. För in kudden tätt mot patientens huvud och fixera den med kardborrefästena direkt mot överdraget. Långt hår som hamnar i området där kudden ska fästas bör föras framåt och in under nackkragen.



4. Fixera patientens huvud med de medföljande hak-pannbanden. Banden fixeras mot de röda kardborrefästena på kudde och överdrag.



**COMFORT** medical

[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)