

# WOUND CARE DryMax<sup>®</sup>

## FOAM

DryMax Foam är ett sterilt polyuretanskumförband med superabsorberande egenskaper avsett för vätskande sår. Förbandet har en lätt vidhäftande kontaktyta som fungerar som appliceringshjälp vid förbandsbyte.

## DryMax Foam



DryMax Foam är ett tunt och diskret skumförband som kan hantera både små och stora mängder sårvätska. Förbandet låser in sårexudat mer effektivt än konventionella polyuretanskumförband och kan även ta hand om tjockflytande sårvätska. En fuktig sårmiljö bibehålls samtidigt som risken för maceration och skador på omgivande hud minimeras. Sårvätskan transporteras på ett effektivt sätt bort från sårytan och fördelas jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core. DryMax Foam absorberar sårvätska som innehåller bakterier och andra, för sår-läkningen, skadliga ämnen.

DryMax Foam har en lätt vidhäftande kontaktyta. Det underlättar vid förbandsbyte och fungerar som vårdgivarens extra hand. Vidhäftningen tillåter återpositionering när förbandet placeras över såret och bidrar samtidigt med en skonsam yta när förbandet ska avlägsnas från såret.


DryMax Foam har en hydrofob blå baksida för att minimera fuktgenomslag. DryMax Foam är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.




- Kostnadseffektiv
- Användarvänlig
- Ökad patientkomfort
- Bättre sår-läkning

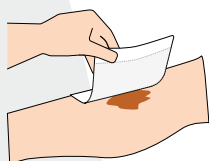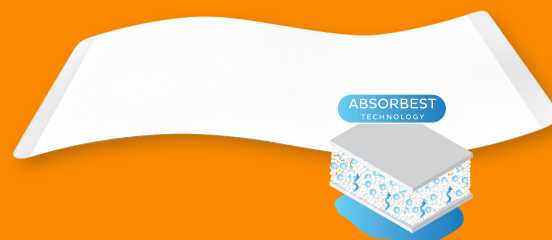

Förbandet placeras i nära kontakt med såret eller i kontakt med ett annat förband.

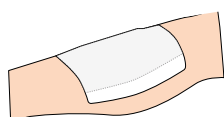

Fixera förbandet på lämpligt sätt med bandagelinda, film eller tejp.

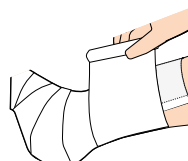

DryMax Foam kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.

Artikel	REF	Pcs/box	Förbandsstorlek (cm)	Absorptionskapacitet*
DryMax Foam 10x10 cm	F60043/10	10	10x10	130 ml
DryMax Foam 15x15 cm	F60044/10	10	15x15	350 ml
DryMax Foam 10x20 cm	F60045/10	10	10x20	350 ml
DryMax Foam 20x20 cm	F60046/10	10	20x20	640 ml



\*) Enligt internationell standard EN 13726-1



Tillverkad av Absorbent AB  
www.absorbent.se | info@absorbent.se