

## Kort bruksanvisning



**1** Ta bort folieskyddet från kyvetten. Vidrör ej den blanka nedre delen av kyvetten.




**2** Håll Sample Collector nästan i ett horisontalt läge under ytan av bloddroppen och fyll kapillärdelen av Sample Collector helt. Torka inte av Sample Collector.



**3** Sätt ner Sample Collector i kuvetten inom 2 minuter. Sätt på reagenskorken ordentligt. Tryck inte ner den turkosa inre delen av korken. Efter att provet satts till bufferten skall analys köras inom 2 timmar.



**4** Välj mätning på QuikRead go instrumentets display. Placera kyvetten i mätbrunnen. Streckkoden ska vara vänd mot dig.

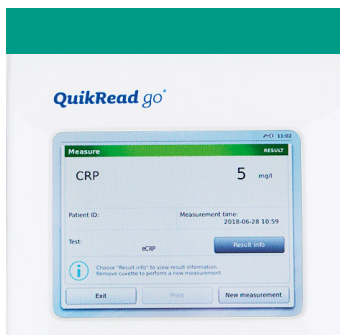

**5** När analysen är klar visas resultatet på displayen och kyvetten kommer automatiskt upp ur mätbrunnen.

*För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.*



## Reagensförvaring



### Reagenskit

Förvaring av öppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum



### Sample Collector ask

Förvaring av öppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum



### Oöppnade kyvetter

Förvaring i 2–8°C:  
hållbar i 6 månader  
Förvaring i 18–25°C:  
hållbar i 3 månader



### Reagenskorkar

Öppnat rör i 2–25°C:  
hållbart till utgångsdatum på kitet  
Öppnat rör i 2–25°C:  
hållbart i 6 månader



### Öppnad kyvett

Provet är stabilt i bufferten i 2 timmar. Utför testet inom 2 timmar efter att kyvetten öppnats. Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs.



### easy CRP-kontroller (se tabell nedan)

Öppnad flaska i 2–8°C:  
hållbar till utgångsdatum  
Öppnad flaska i 2–8°C:  
hållbar upp till två månader  
Det rekommenderas att kontrollen överförs med pipett till ett parafilm och därefter samlas upp i Sample Collectorn.



Orion Diagnostica Oy / Sverige  
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd  
Tel. 08-623 64 40  
www.oriondiagnostica.se, www.quikread.com, www.tackleamr.com

8100-01SE, 01/2019

Produkt	Art.nr.
QuikRead go easy CRP, 50 tester » med 10 µl Sample Collector	153287
Ultrasensitiv CRP-kontroll	68257
QuikRead go wrCRP-kontroll	153038
QuikRead go wrCRP-kontroll hög	153039
QuikRead go CRP-kontroll låg	153765
QuikRead go CRP-kontroll	153764
QuikRead go CRP-kontroll hög	153763
QuikRead go Instrument	133893

Läs mer på [www.quikread.com](http://www.quikread.com)