

WOUND CARE DryMax[®]

NON STERILE


DryMax NON STERILE är ett följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax NON STERILE absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhäkningsmiljö bibehålls.

DryMax NON STERILE


DryMax NON STERILE ska användas som ett sekundärt sårförband. Det har en enkel design med absorption från båda sidor vilket möjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.

Förbandet känns torrt och behagligt för patienten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhäkningsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från såret och primärförbandet. Vätskan fördelas jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core.


Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax NON STERILE är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

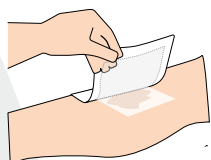

Förbandet placeras i nära kontakt med ett passende primärförband.

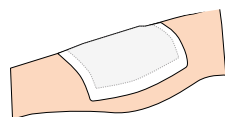

Fäst förbandet med bandage, film eller tape.

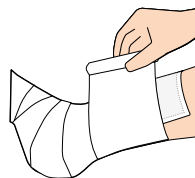

DryMax NON STERILE kan kombineras med kompressionsbehandling.

Artikel	Art. nr.	Ant./frp.	Produktstorlek (cm)	Absorptionskapacitet*
DryMax NON STERILE 10x10 cm	F20011/200	200	10x10	50 ml
DryMax NON STERILE 10x22 cm	F20021/100	100	10x22	150 ml
DryMax NON STERILE 20x22 cm	F20041/100	100	20x22	300 ml
DryMax NON STERILE 20x30 cm	F20051/75	75	20x30	420 ml



*) Enligt internationell standard EN-13726-1



- Kostnadseffektiv
- Användarvänlig
- Ökad patientkomfort
- Bättre sårhäkning



Art. nr.	Artikelnummer OneMed
F20011/200	1000690
F20021/100	285249
F20041/100	1000689
F20051/75	Anbudssortiment*

*) Finns att beställa från AbsorbBest med 4 veckors leveranstid



Tillverkad av ABSORBEST AB
www.absorbBest.se | info@absorbBest.se