

# SILVERLON

Antimikrobiellt förband – en fin nylonväv med teknologi som skiljer sig från andra silverförband. Silverlon innehåller mer metalliskt silver än något annat förband.

Silvret i Silverlon är pläterat, det vill säga invävt i förbandets struktur och i mycket hög koncentration. Silverlon aktiveras av fukt och avger endast silverjoner till såret, inte metall/silver som kan ge upphov till missfärgningar av huden samt i vissa fall orsaka smärta/sveda. Förbandet bidrar till en omedelbar antimikrobiell effekt och en skyddande barriär mot ett brett spektrum av patogener inklusive MRSA och Pseudomonas. Bakom Silverlon förbanden finns en bred och omfattande dokumentation. Inga allvarliga biverkningar finns rapporterade.



## ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Silverförband används under en begränsad behandlingstid och på klar indikation. Se lokala behandlingsriktlinjer för silverförband. Fukta alltid förbandet med vatten eller NaCl före applicering, för aktivering så att silverjonerna kan frisättas. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kan användas vid bland annat traumatiska sår, kirurgiska sår, brännskador, trycksår, bensår, diabetessår.
- Använd inte Silverlon i kombination med salvor, krämer eller salvkompresser.
- Använd inte vid känd överkänslighet mot silver eller nylon.



## Beställningsinformation

Silverlon - Wound Contact Dressings		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
WCD-22	5cm x 5cm	10
WCD-44	10cm x 10cm	10
WCD-412	10cm x 30cm	10
WCD-1012	25cm x 30 cm	5
WCD-466	10cm x 168cm	1
WCD22-NPS	5cm x 5 cm	10
WCD45-NPS	10cm x 13cm	10
WCD58-NPS	13cm x 20cm	5
WCD512-NPS	13cm x 30cm	5
WCD66-NPS	15cm x 15cm	5
WCD-1212-NPS	30 cm x 30 cm	5
WCD22-NPS-FLX-10-CE	5cm x 5 cm	10
WCD22-NPS-FLX-CE	5cm x 5 cm	5
WCD44-NPS-FLX-10-CE	10cm x 10cm	10
WCD44-NPS-FLX-CE	10cm x 10cm	5
WCD48-NPS-FLX-10-CE	10cm x 20cm	10
WCD48-NPS-FLX-CE	10cm x 20cm	5
WCD88-NPS-FLX-10-CE	20cm x 20cm	10
WCD88-NPS-FLX-CE	20cm x 20cm	5

Silverlon - Acute Burn Gloves		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
ABG-01XS	X-Small	1
ABG-01S	Small	1
ABG-01M	Medium	1
ABG-01L	Large	1
ABG-01XL	X-Large	1
ABG-1XXL	XX-Large	1

Silverlon - Burn Contact Dressings		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
BCD-44	4" x4"	10
BCD-48	4" X 8"	10
BCD-816	8"x 16"	5
BCD-1616	16" X 16"	1
BCD-2424	24" X 24"	1
BCD-CDL	25.5" X 30"	1
BCD-CDM	25" X 26"	1

Silverlon - Negative Pressure Dressings		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
NPD-22	2" X 2"	10
NPD-45	4" X 5"	10
NPD-58	5" X 8"	5
NPD-512	5" X 12"	5
NPD-1212	12" X 12"	1

Silverlon - Wound Packing Strips		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
WPS-112	2,5cmx30cm	5
WPS-124	1" X 24"	5

IV/Cath Dressings - 1" Lifesavers™		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
IVCD-15		10
IVCD-40		10
IVCD-70	IV/Kateter Lifesaver	10

Silverlon - Digit Dressings		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
DS-112	1" X 12"	5

Silverlon - Burn Pad Dressings		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
BPD-44	4" X 5"	5
BPD-48	4" X 8"	5
BPD-816	8" X 16"	5

Silverlon - Elastic Burn Wraps		
Artikelnummer	Storlek	Ant/fp
BWD-466	4" X 66"	1
BWD-6108	6" X 108"	1

### För mer information vänligen kontakta:

#### Birgitta Thorin

Tlf: 070-659 66 02

Mail: [biggan@partnermed.se](mailto:biggan@partnermed.se)

Region: Norra Sverige

#### Camilla Bergenheim

Tlf: 072-150 49 80

Mail: [camilla@partnermed.se](mailto:camilla@partnermed.se)

Region: Mellansverige

#### Anders Larsson

Tlf: 073-336 87 02

Mail: [anders@partnermed.se](mailto:anders@partnermed.se)

Region: Södra Sverige