

+ PICO[◇] 14 för djupa sår^{1,2}

Smith+Nephew

PICO[◇] 14

Engångssystem för sårbehandling med negativt tryck

Helping you get **CLOSER TO ZERO[◇]**
delay in wound healing^{3,4}

smith-nephew.com/pico



PICO 14 förband med AIRLOCK-[◇] teknologi har visat sig kunna hantera låga till måttliga mängder sårvätska och leverera ett nominellt -80 mmHg negativt tryck i sår som är djupare än 2 cm när det används med ett sårfyllnadsmaterial^{1,2}


+ Som en del av en behandlingsplan visade det sig att användning av PICO[®] sNPWT på en mängd svårläkta sår djupare än 2 cm avsevärt minskar genomsnittstiden för sårsläkning med 11,75 veckor*²

PICO-förband kan användas med eller utan sårfillnadsmaterial

Om sårdjupet är mindre än 0,5 cm kan PICO-förbandet appliceras direkt på såret. Om såret är djupare än 0,5 cm behövs sannolikt ett sårfillnadsmaterial.

Tips: När du applicerar PICO-förband utan sårfillnadsmaterial, anpassa försiktigt förbandet till såret med hjälp av fingrarna

För sårtyper under 2 cm kan det vara lämpligt att använda sårfillnadsmaterial när:

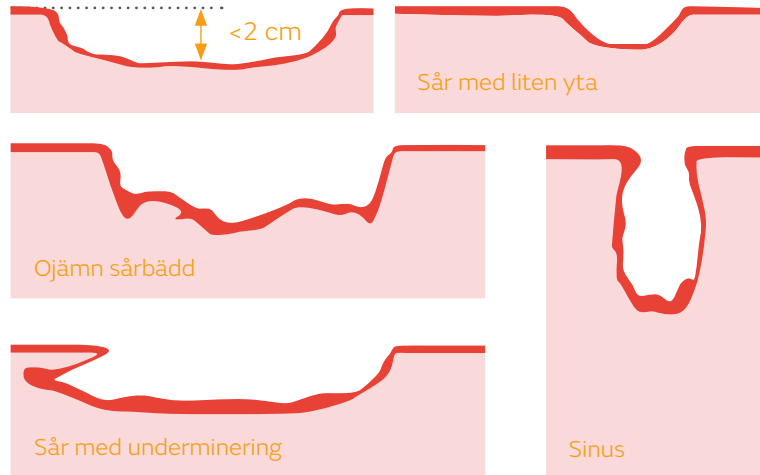

För detaljerad produktinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar, se produktens tillämpliga bruksanvisning före användning.


Beställningsinformation för PICO 14

Förband	Förbandsstorlek	PICO 14 +2 förband	Multipack [†]
	10 cm x 20 cm	66802042	66802022
	10 cm x 30 cm	66802043	66802023
	10 cm x 40 cm	66802044	66802024
	15 cm x 15 cm	66802045	66802025
	15 cm x 20 cm	66802046	66802026
	15 cm x 30 cm	66802047	66802027
	20 cm x 20 cm	66802048	66802028
	25 cm x 25 cm	66802049	66802029
	Multisite small 15 cm x 20 cm	66802040	66802020
	Multisite large 20 cm x 25 cm	66802041	66802021

Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
Box 143
431 22 Mölndal
Sverige

NPWT-sårfillnadsmaterial

Sår som är djupare än 2 cm måste fyllas med gasväv eller skum med PICO-systemet för att säkerställa optimal behandling av hela sårytan.¹

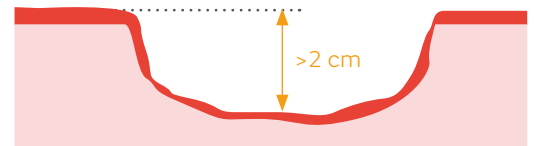

(Exempel på djupare sår)

Applicering av sårfillnadsmaterial

Sårfillnad med gasväv



- Applicera ett lager av gasväv fuktad med koksaltlösning på sårbädden. Fortsätt applicera gasväv i lager, tills gasväven löst fyller hela sårhålan.
- Undvik att packa sårhålan för mycket
- Se till att gasväven inte överlappar till frisk hud

Sårfillnadsmaterial med skum



- Klipp skummet så att dess storlek och form passar
- Klipp INTE skummet direkt över såret
- Se till att skummet inte överlappar till frisk hud

Förbrukningsartiklar

Produkt	Storlek	Artnr.
Skum	10 cm x 12,5 cm	66801021
Gasväv (5 rullar) + 1 SECURA [®] No Sting Barrier Film	11,4 cm x 3,7 m	66802127

www.smith-nephew.com

Tel: 031-746 58 00
Fax: 031-87 05 32

◊ Varumärke som tillhör Smith+Nephew
Alla varumärken erkänns
©November 2020 Smith+Nephew
AWM-AWC-27507 | GMC1219b-sv

*Jämfört med standardförband; p<0,05, n = 409 mot n = 2242. †Multipacks = endast 5 förband.

Referenser
1. Smith+Nephew 2018. The review of evidence supporting the use of PICO in wounds ≥2cm in depth. Internal report. EOAWM.PCS230.001.v2. 2. Hurd T, Gilchrist B. Single use negative pressure wound therapy (sNPWT) in the community management of chronic open wounds deeper than 2cm. Paper presented at: Symposium on Advanced Wound Care/Wound Healing Society Meeting; 2020; Abu Dhabi. 3. Dowsett C, et al. Use of PICO to improve clinical and economic outcomes in hard-to-heal wounds. *Wounds International*. 2017;8(2):52–58. 4. Kirsner R, et al. A Prospective, randomized, controlled clinical trial on the efficacy of a single-use negative pressure wound therapy system, compared to traditional negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. *Wound Repair and Regeneration*. 2019;27(5):519–529.