

# Bladlancett, barn

för kapillärprovtagning



- Säker för användare och patient - kan ej återanvändas
- Steril
- Enkel att använda – säkrad avfyringsanordning eliminerar risken för oavsiktlig aktivering
- Greppvänlig – tre möjliga grepp
- Bra precision – har en liten anläggningsyta
- Mjukt silikoniserat blad
- CE- märkta

## Bruksanvisning:



1. Vrid av skyddslocket genom att vrida  $\frac{1}{4}$  varv
2. Tryck Safety Lancet fast mot den utvalda och rengjorda punktionsytan och tryck på avtrycksknappen (uppstår klick ljud)
3. Kasta genast den använda lansetten i därför avsedd behållare

Tre valfria grepp:



Aktivering med tummen



Aktivering med pekfinger



<b>Benämning:</b>	<b>Blodvolym:</b>	<b>Artikelnummer:</b>	<b>Inner / ytterfp:</b>
Bladlancett barn, stickdjup 1,6mm, blad 1,5mm, violett	Högflöde ~200-600µl	85.1018	200 / 1200