

# Biatain<sup>®</sup> Alginate

- optimal absorption för fibrinbelagda sår och kavitetet



Biatain Alginate är ett kraftigt absorberande alginatförband för kraftigt vätskande sår i alla storlekar, former och djup.

- Utmärkt till kaviteter<sup>3</sup>
- Unik materialsammansättning<sup>1,2</sup>
- Minimal risk för läckage och maceration
- Dokumenterat hemostatisk effekt<sup>4</sup>



## Användningsområde

Biatain Alginate används för måttligt till kraftigt vätskande sår såsom bensår, trycksår, diabetiska fotsår, tagställen, traumatiska sår och 2:a gradens brännskador. Biatain Alginate kan hantera lättare blödningar i ytliga sår. Biatain Alginate kan användas under kompression. Biatain Alginate bör inte användas på torra eller lätt vätskande sår ej heller på kraftigt blödande sår.



Biatain Alginate är ett kraftigt absorberande alginatförband för måttligt till kraftigt vätskande sår i alla storlekar, former och djup. Biatain Alginate har en optimal absorption jämfört med andra alginater och fiberförband.<sup>1</sup>



### Utmärkt för kaviteter

Design och struktur gör det möjligt att klippa och anpassa förbandet till olika sår oavsett storlek, form och djup. Förbandet formar sig efter sårbottnen som en viktig del i sårhelingsprocessen.

### Unik materialsammansättning

Det är möjligt att avlägsna förbandet som en enhet med minimal smärta och trauma för patienten.<sup>1,2</sup>

### Minimal risk för läckage och maceration

Den optimala absorptionen i Biatain Alginate<sup>1,2</sup> och förvandlingen till gel, håller sårvätskan insluten i förbandet, förhindrar läckage som annars kan förstöra kringliggande vävnad.

### Dokumenterat hemostatisk effekt

I motsats till hydrofiberförband har Biatain Alginate en dokumenterat hemostatisk effekt, mindre blödningar stoppas genom att kalciumjoner frigörs från förbandet.<sup>4</sup>


### Funktion

Vid absorption av sårvätska bildas en mjuk, sammanhängande gel, som främjar sårhelningen en optimalt fuktig miljö.<sup>2</sup>

### Material

Biatain är ett alginatförband som består av 85% kalciumalginat och 15% hydrocolloid (CMC).

Biatain Alginate har en optimal absorption jämfört med Aquacel®<sup>1</sup>

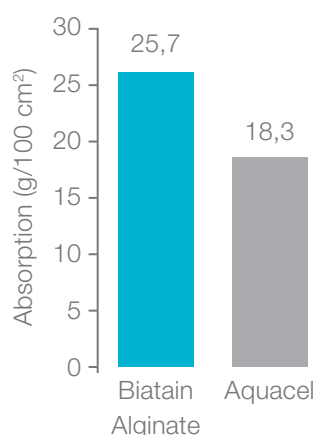

### Biatain Alginate

Varunr.	Storlek i cm	Antal /fp
37052	5x5	30
37102	10x10	10
37152	15x15	10
37402	3x44 filler	6

# ONE MED

Coloplast sårhelingsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av:

OneMed Sverige AB  
Dockplatsen 12  
SE-211 19 MALMÖ  
www.onemed.se

1. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf  
2. Timmons. Professional Nurse 1999;14(7).  
3. <http://www.worldwidewounds.com/1998/june/Alginates-FAQ/alginates-questions.html>  
4. Segal et al. Journal of Biomaterials Applications 1998;249.