

# Biatain<sup>®</sup> icke häftande

- optimal absorption för sår på skör hud



Biatain icke häftande är ett mjukt och formbart polyuretanskumförband.

- Unik 3D skumstruktur för optimal absorption<sup>1-3</sup>
- Minimal maceration och läckage<sup>1</sup>
- Lång användningstid
- Mjukt och formbart förband<sup>4,5</sup>



## Användningsområde

Biatain icke häftande används till en lång rad olika vätskande sår såsom bensår, trycksår, diabetiska fotsår, 2:a gradens brännskador, tagställen, postoperativa sår och hudavskrapningar. Biatain icke häftande kan användas i kombination med kompressionsbehandling.



Biatain icke häftande och Biatain Soft-Hold är mjuka och formbara skumförband som effektivt absorberar och håller sårvätskan borta från såret.<sup>1,2</sup> På så sätt bidrar en fuktig miljö som är optimal för läkningen av vätskande sår.<sup>7,8</sup>



### Unik 3D skumstruktur för optimal absorption

När sårvätskan kommer i kontakt med skumstrukturen formar sig Biatain tätt efter sårbotten för optimal absorption - även under kompression.<sup>1-3</sup>

### Minimal maceration och läckage<sup>1</sup>

Den optimala absorptionen och inkapslaget av sårvätska minimerar risken för maceration och läckage. Biatain icke häftande och Biatain Soft-Hold är valet till sår på skör och skadad vävnad.

### Lång användningstid

Biatain har en lång användningstid på grund av sin optimala absorptionskapacitet. Kliniska studier visar att Biatain är en kostnadsbesparande lösningen, med en användningstid på upp till 7 dagar.<sup>6-8</sup>

### Mjukt och formbart förband

Biatain icke häftande är mycket behaglig att bära och de avfasade kanterna reducerar risken för tryckmärke.<sup>4</sup>


### Funktion

3D skumstrukturen i Biatain absorberar sårvätskan vertikalt och håller vätskan kvar i förbandet, på så vis upprätthålls en fuktig sår-läkningmiljö.

### Material

Biatain icke häftande består av ett mjukt och formbart polyuretanskum och en semi-permeabel toppfilm, som är vatten- och bakterietät. Biatain Soft-Hold har dessutom ett lätt häftande lager på sår dynan, och är därför valet för sår som är svåra att bandagera. Vid häftningen fungerar som en 3:e hand vid förbandsbyten.

### Unik 3D skumstruktur

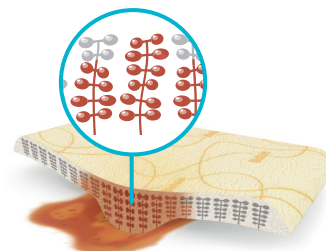

### Biatain icke häftande

Varunr.	Storlek i cm	Antal /fp
334100	10x10	10
334120	10x20	5
334130	15x15	5
334160	20x20	5
361050	5x7	10

### Biatain Soft Hold

Varunr.	Storlek i cm	Antal /fp
334700	10x10	5
334720	10x20	5
334730	5x7	5
334750	15x15	5

**ONEMED**

Coloplast sår-läkning produkter säljs och marknadsförs i Sverige av:

OneMed Sverige AB  
Dockplatsen 12  
SE-211 19 MALMÖ  
www.onemed.se

1. Andersen et al. Ostomy/Wound Management 2002;(48)8:34-41  
2. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf  
3. Reitzel et al. EWMA 2008  
4. Jørgensen et al. EWMA 2008  
5. Vogensen. British Journal of Nursing 2006;15(21):1162-65  
6. Bale et al. EWMA 2002  
7. White R and Cutting KF. Modern exudate management: a review of wound treatments. WorldWideWounds 2006.  
8. Romanelli et al. Exudate management made easy. Wounds International 2010;1(2).