

Biatain[®] Super

- optimal absorption för kraftigt vätskande sår




Biatain Super är ett superabsorberande hydrokapillärt förband med eller utan häftkant.

- Valet för kraftigt vätskande sår²
- Optimalt fuktig sår läkningsmiljö för snabbare sår läkning¹⁻³
- Ett enkelt allt-i-ett förband¹



Användningsområde

Biatain Super används till behandling av en lång rad sår såsom bensår, trycksår, diabetiska fotsår, 2:a gradens brännskador, kirurgiska sår och hudavskrapningar. Biatain Super kan användas under kompressionsbehandling.

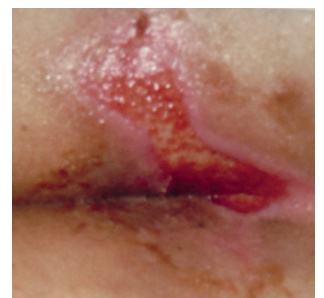

Biatain Super är ett superabsorberande hydrokapillärt bandage som skapar en optimalt fuktig sårmiljö i vätskande sår.



Valet för kraftigt vätskande sår

Med snabb absorption, hantering och kvarhållande av sårvätska utnyttjas förbandets absorptionskapacitet fullt ut, risken för läckage och maceration är minimal även på kraftigt vätskande sår.

Optimal, fuktig sårmiljö för snabbare läkning

Den hydrokapillära dynan absorberar sårvätska snabbt och vertikalt, fördelar sedan sårvätskan horisontellt. Det icke vidhäftande sårkontaktlagret upprätthåller en fuktig sårmiljö.

Allt-i-ett förband

Jämfört med andra superabsorberande förband är Biatain Super en kostnadseffektiv lösning eftersom det inte finns något behov av extra fixering eller kontaktlager.


Funktion

Superabsorberande partiklar suger upp och stänger inne stora mängder sårvätska. Fibrerna fördelar sårvätskan i dynan så att absorptionsförmågan ökas. Den höga avdunstningen skapar en optimal exsudathantering.


Material

Biatain Super består av en superabsorberande hydrokapillär dyna med en semi-permeabel toppfilm, som är vatten- och bakterietät, och ett icke vidhäftande sårkontaktlager. Biatain Super, i häftande version, har en mjuk häftkant av hydrocolloid.

Biatain Super, häftande

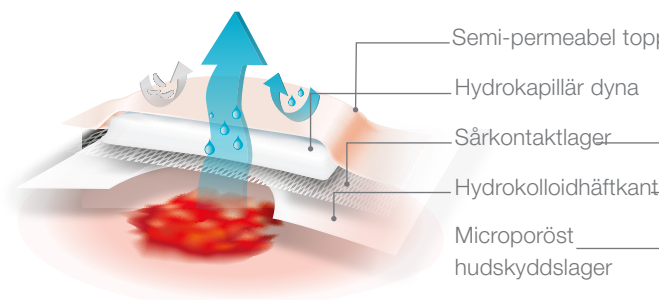

Biatain Super, icke häftande

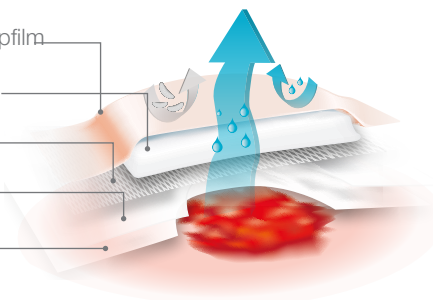

Biatain Super, häftande

Varunr.	Storlek i cm	Sårdynans storlek	Antal/fp
46100	10x10	6x6	10
46120	12,5x12,5	8,5x8,5	10
46150	15x15	10x10	10
46200	20x20	14x14	10

Biatain Super, icke häftande

Varunr.	Storlek i cm	Sårdynans storlek	Antal/fp
46320	12,5x12,5	8,5x8,5	10
46390	20x20	14x14	10

1. Morris. British Journal of Nursing 2003; 12(10): 630-35
2. Norkus et al. Journal of Wound Care 2005; 14(9):429-32.
3. Karlsmark et al. British Journal of Nursing 2004; 13(6): S29-S35