

## Produktblad TENA Pants Bariatric

### Användningsområde

TENA Pants Bariatric är ett komfortabelt byxskydd i extra stor storlek, XXL och är speciellt framtaget för vårdtagare med klinisk övervikt. Skydden finns i en absorptionsnivå (Plus).



# Produktfaktablad TENA Pants Bariatric

## Produktegenskaper

TENA Pants Bariatric är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med FeelDry ytskiktet gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Stabil och mjuk benelastik ger en säker och bekväm passform.


TENA Pants Bariatric är ett mycket bekvämt skydd. Midjeresåren (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Mjuka, textilliknande material i hela produkten gör produkten bekväm att ha på sig.

TENA Pants Bariatric är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt. Odour neutralizer neutraliserar effekten av oönskad lukt. Färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå.

### TENA Pants Bariatric

Uppsugningsnivå/ Midja/höft storlek	Midja/höft cm	Vikt g	Benöppning cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptionskapacitet	Essity Art.nr
Plus									
XXL	150-203	95	40-65	12	48	12	551	1652	79 28 62

## Användarinstruktion

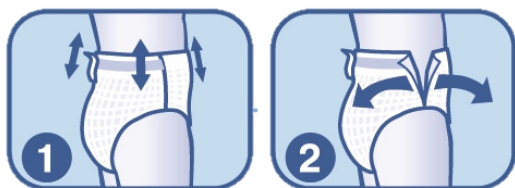

# Produktfaktablad TENA Pants Bariatric

## Ingående material

### YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

### INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

### ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### HÖFT- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

### BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyethylene

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning,

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 27 20 20

✉ tena.nu@essity.com

🌐 tena.nu

📘 facebook.com/TENASverige



TENA  
an Essity brand

