

# Qufora<sup>®</sup> IrriSedo Bed

För transanal irrigation med hög volym



## Användning

Qufora IrriSedo Balloon är ett transanalt irrigationssystem avsett för tömning av innehållet i den nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen med hjälp av en kateter och uppsamlingspåse

## Indikationer

Qufora IrriSedo Bed är indikerad för vuxna samt barn från tre år som lider av avföringsinkontinens, och/eller förstoppning. Till exempel:

- Neurogen tarmdysfunktion, t.ex. ryggmärgsskada, spina bifida och multipel skleros
- Kronisk förstoppning
- Kronisk fekal inkontinens

Det krävs hjälp av en vårdare för att utföra proceduren

## Kontraindikationer

Transanal irrigation ska inte användas under följande omständigheter (absoluta kontraindikationer):


- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektal cancer/bäckenmalignitet före kirurgiskt avlägsnande
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit
- Inom 3 månader från en anal eller kolorektal operation
- Inom 4 veckor från endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit

Eftersom listan inte är uttömmande ska sjukvårdspersonal alltid beakta även individuella patientfaktorer.

## Produktkonfigurationer

Typ av irrigationssystem	Beställningskod	Produkt	Innehåll
<b>Qufora<sup>®</sup> IrriSedo Bed</b> Konsystem med handpump	53001-111	Provset	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 1 x rektalkatetrar Ø12 (engångsbruk), 1 x rektalkatetrar Ø21, 1 x rektalkatetrar Ø30 (engångsbruk), 1 x gel, 1 x krok, 1 x uppsamlingspåse
	53201-015	Irrigationsset Ø12	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 15 x rektalkatetrar Ø12, 1 x gel, 1 x krok, 1 x uppsamlingspåse
	53001-015	Irrigationsset Ø21	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 15 x rektalkatetrar Ø21, 1 x gel, 1 x krok, 1 x uppsamlingspåse
	53101-015	Irrigationsset Ø30	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 15 x rektalkatetrar Ø30, 1 x gel, 1 x krok, 1 x uppsamlingspåse

## Qufora IrriSedo Bed

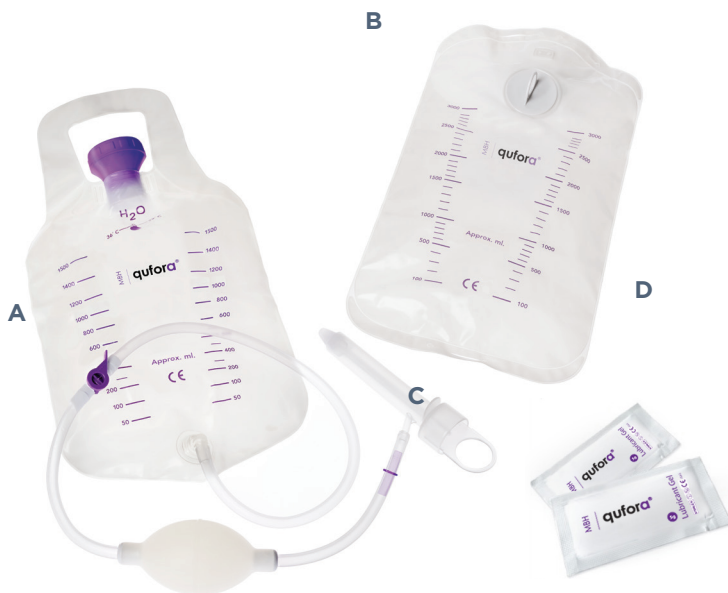

### Funktioner

- Katetrar med storlek Ø 21 och Ø 30 levereras med en guide för införande av katetern i ändtarmen
- Systemet är stängt så att sjukvårdspersonalen aldrig kommer i direkt kontakt med avföring och lukt minimeras
- Den manuella pumpen har en backventil som förhindrar återflöde vatten rinner tillbaka in i pumpen

### Produktbeskrivning

- A.** 1500 ml vattenpåse med en ventil och en pump
- B.** 3000 ml uppsamlingspåse
- C.** Katetrar för engångsbruk, tre olika storlekar Ø (diameter: 12, 21 och 30 mm)
- D.** Gelpåsar

Uppsamlingspåsen ansluts till rektalkatetern



### Katetrar



## Materialbeskrivning

Delar	Material	Mjukmedel
Kateter		
Kateter	PP	Inget mjukmedel
Uppsamlingspåse		
Uppsamlingspåse	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Kateterdocka och kontakt	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Luftfilter	PA	Inget mjukmedel
Vattenpåse		
Film	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Lila tratt/skruvlock	PVC, ftalatfri/PE	DEHT/DOTP
Frostad slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Ventil	PP (vit del)/HDPE (lila del)	Inget mjukmedel
Pump	PVC, ftalatfri	DINCH
Vit NRV-ventil ut och in	Hård PVC	Inget mjukmedel
Nät för ventil	Hård PVC	Inget mjukmedel
Svarta ventilkulor	Nitril (NBR)	Inget mjukmedel

## Mått och vikt

Mått	Längd	Diameter	Volym
Kateterstandarder	143,5 mm	Ø12, Ø21, Ø30 mm	
Vattenpåse			1,5 l
Uppsamlingspåse			3,0 l
Pump			90 ml
Slang	140 cm (incl. pump)		

## Rekommenderad användningstid:

- Katetern och uppsamlingspåsen är för engångsbruk.
- Vattenpåsen och pumpen kan användas upp till 1 månad. (när den används regelbundet varannan dag)

Om missfärgning skulle uppstå på någon del av systemet inom den rekommenderade användningstiden, ska delen bytas ut.

## Hållbarhet

5 år från produktion.

## Rengörning

Med undantag för katetern och uppsamlingspåsen, som är för engångsbruk, kan alla komponenter vid behov tvättas i mild tvålsvamp.

## Förvaring

Förvaras torrt vid en temperatur på mellan 0°C och 30°C, skyddat från direkt solljus och utom räckhåll för barn.

## Kassering

Qufora IrriSedo Bed kräver inga särskilda avfallsprotokoll och kan kasseras med vanligt hushållsavfall enligt lokala riktlinjer och rekommendationer.

## Klassificering och sterilisering

Qufora IrriSedo Bed är en produkt av klass I, icke-steril.

## Standarder och föreskrifter

- MDR (Regulation 2017/745) – CE
- UK MDR 2002 – UKCA
- ISO 13485:2016 (certified)