

Qufora[®] IrriSedo Klick

För transanal irrigation med hög volym



Produktbeskrivning & Produktegenskaper



- Vattenpåsens placering, fristående på golvet eller på en närbelägen yta eller hängande, kan anpassas till individuella preferenser och miljöer och tillåter irrigation från alla höjder under axelhöjd
- Bred hals gör den enkel att fylla och tömma. Det integrerade snäpplocket är lätt att använda, det är bara att öppna och stänga det
- Det mjuka grepphandtaget är bekvämt att använda om du bär vattenpåsen när den är full av vatten och stabil för att hänga upp den
- Lättavläst skala med tydliga markeringar som visar mängden vatten som används

Styrenhet med kompakt pump



- Styrenheten har en lättläst display, en logisk 1-2-3-4 medurs procedur med fyra pauslägen för att möjliggöra kontroll under irrigationen
- Förmonterat fixeringsband och styrenhetens design gör att den enkelt kan fästas vid låret eller till en rullstol om det behövs
- Kompakt pump väger lite, så den är lätt att hålla och klämma

Rektalkateter med hydrofil beläggning och vattenfyllda silikonballong



- Engångskatetern har en hydrofil yta och är klar att användas när den doppas i vatten
- Katetern har en bred bas för kontrollerat införande och avlägsnande
- Den vattenfyllda silikonballongen säkerställer en säker förslutning i ändtarmen under irrigation

Slang med klickkoppling



- Enkel klickanslutning mellan kateter och kontrollenhet
- Den lila färgen på del olika delarna indikerar hur man ska montera ihop produkten, klickljudet garanterar att du har monterat produkten korrekt

Materialbeskrivning

Delar	Material	Mjukgörare
Ballongkateter		
Kateter	TPE	Inget mjukgörare
Ballong	Silikon	Inget mjukgörare
Konektor	ABS	Inget mjukgörare
Hydrofil polyuretan-beläggning	PVP	Inget mjukgörare
Slang med klickkoppling		
Inre slang/yttre slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Konektor	ABS	Inget mjukgörare
Klickanslutning	ABS, POM, TPE	Inget mjukgörare
Styrenhet		
Lock/hus	ABS/ABS	Inget mjukgörare
O-ring	Nitril	Inget mjukgörare
Svart överdrag	EPDM	Inget mjukgörare
Plastfjäder	POM	Inget mjukgörare
Fjäder	Rostfritt stål	
Huvudpackning	TPE	Inget mjukgörare
Support	POM	Inget mjukgörare
Sealing	TPE	Inget mjukgörare
Fixeringsband	Polyester/Silikon/elasten	inget mjukgörare
Frostad slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Pump	PVC, ftalatfri	DINCH
Vit NRV-ventil ut och in	Hård PVC	Inget mjukgörare
Nät för ventil	Hård PVC	Inget mjukgörare
Svarta ventilkulor	Nitril (NBR)	Inget mjukgörare
Vattenpåse		
Film	PE/PA	Inget mjukgörare
Tratt	HDPE	Inget mjukgörare
Lock	ABS/TPE	Inget mjukgörare
Anti-vakuumventil	Silikon	Inget mjukgörare
Slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Påsutlopp	HDPE	Inget mjukgörare
Ventil	ABS/HDPE	Inget mjukgörare
Grepphandtag	TPE	Inget mjukgörare
Lila koppling	ABS	Inget mjukgörare

Mått och vikt

Mått	Längd	Diameter	Volym
Ballongkateter	12 cm	1,1 cm	
Vattenpåse	27 cm	D 10 cm, B 17 cm	1500 ml
Slang med klickkoppling	100 cm	1,2 cm	

Rekommenderad användningstid

- Vattenpåse och slang med klickkoppling kan användas upp till en månad (15 gånger för irrigation varannan dag och 30 gånger för irrigation varje dag)
- Pumpen och kontrollenheten kan användas upp till 90 gånger
- Ballongkatetern är för engångsbruk

Hållbarhet

3 år från produktion

Kassering

Qufora IrriSedo Klick kräver inga särskilda avfallsprotokoll och kan kasseras med vanligt hushållsavfall enligt lokala riktlinjer och rekommendationer

Klassificering och sterilisering

Qufora IrriSedo Klick är en produkt av klass I, icke-steril

Standarder och föreskrifter

- MDR (Regulation 2017/745) - CE
- UK MDR 2002 - UKCA
- ISO 13485:2016 (certified)

Qufora® IrriSedo Klick

För transanal irrigation med hög volym

Användning

Qufora IrriSedo Klick är ett transanalt irrigationssystem avsett för tömning av innehållet i den nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen med hjälp av en ballongkateter.



Indikationer

Qufora IrriSedo Klick är indikerad för vuxna samt barn från tre år som lider av avföringsinkontinens, och/eller förstoppning. Till exempel:

- Neurogen tarmdysfunktion, t.ex. ryggmärgsskada, spina bifida och multipel skleros
- Kronisk förstoppning
- Kronisk fekal inkontinens

I dessa grupper kan vissa personer behöva hjälp av en vårdare för att utföra proceduren.

Kontraindikationer

Transanal irrigation ska inte användas under följande omständigheter (absoluta kontraindikationer):

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektal cancer/bäckenmalignitet före kirurgiskt avlägsnande
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit
- Inom 3 månader från en anal eller kolorektal operation
- Inom 4 veckor från endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit

Eftersom listan inte är uttömmande ska sjukvårdspersonal alltid beakta även individuella patientfaktorer.

Produktkonfigurationer

Typ av irrigationssystem	Beställningskod	Produkt	Innehåll
Qufora® IrriSedo Klick	59101-002	Start set (2 katetrar)	1 x kontrollenhet, 2 x rektalkatetrar, 1 x vattenpåse, 1 x slang, 1 x krok, 1 x necessär
	59001-005	Start set (5 katetrar)	1 x kontrollenhet, 5 x rektalkatetrar, 1 x vattenpåse, 1 x slang, 1 x krok, 1 x necessär
	59101-015	Start set (15 katetrar)	1 x kontrollenhet, 15 x rektalkatetrar, 1 x vattenpåse, 1 x slang, 1 x krok, 1 x necessär
Tillbehör eller förbruksartiklar	59201-015	Förbrukningsset	15 x rektalkatetrar, 1 x vattenpåse, 1 x slang
	59301-010	Rektalkateter	10 x rektalkatetrar
	59301-015	Rektalkateter	15 x rektalkatetrar
	59050-001	Slangset	1 x slang med klickkoppling
	54060-002	Fixeringsband	2 x fixeringsband