

# Produktfaktablad

## HOMEATH®

### PVC-fri



#### HOMEATH hydrofil tappningskateter PVC-fri

Klass: Class IIa  
Certifiering: ISO 13485-2003, ISO 9001-2000, CE 93/42/EEC  
Anmält organ: UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co.  
Ltd.(European Notified Body Nr. 2292)  
Certifiering nr: 85209  
58524  
M.2016.106.6895

#### KARAKTERISTIKA

Hydrofil tappningskateter är en engångs urintappningskateter tillverkad av termoplastisk elastomer (TPS-SEBS) och täckt med tvärbunden PVP (Polyvinylpyrrolidon) för hydrofil ren intermitterent kateterisering. Ytskiktet på Homecath® katetrar har en hydrofil beläggning som binder vatten. Resultatet är en mycket blöt och hal yta som har en 90-95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. Den hydrofila ytan innebär att katetern har låg friktion när den införes.

Katetern har jämn beläggning, slät yta, sidohålen avfasade och toppen avrundad.

Kateterkonnektorerna har en internationell färgkod enligt följande:

CH	06	08	10	12	14	16	18
Färg	Ljusgrön	Blå	Svart	Vit	Mörkgrön	Orange	Röd

#### SORTIMENT (Per kön och ålder)

##### Nelaton

Män: 40 cm, CH 06-08-10-12-14-16-18

Kvinnor: 15 cm CH 12-14 och 20 cm CH 12-14-16-18.

Barn: 15 cm CH 08-10 och 20 cm CH 06-08-10 & 30 cm CH 06-08-10-12.

##### Tiemann

Män: 40 cm CH 08-10-12-14-16-18

(CH: Charriere 1 mm = 3 CH)

#### STERILISATION

Steriliseras med Etylenoxid

För engångsbruk

#### INDIKATIONER

- Tömning av urinblåsan, på sjukvårdsinrättning eller i hemmet
- Ren intermitterent kateterisering

Handhavandeinstruktioner finns på förpackningen.



### **ANVISNING FÖR ANVÄNDNING**

- Händerna bör tvättas innan kateterisering.
- Öppna kateterpåsen genom att dra i flikarna på konnektorsidan.
- Fyll förpackningen med vatten.
- Förpackningen kan fästas på en torr yta med hjälp av tejp.
- Katetern bör dränkas i vatten under minst 30 sekunder, för att bli hal och glatt inför kateteriseringen.
- Ta bort vattnet från förpackningen. Katetern är nu klar att användas.
- Om katetern är alltför hal att hantera, kan förpackningen öppnas genom att dra i bottenflikarna och utföra kateterisering utan att överhuvudtaget vidröra katetern.
- För in HomeCath® katetern i urinröret upp till urinblåsan. När urinen börjar rinna, skjuts katetern in lite längre. Håll katetern på plats tills urinen har upphört att flöda. Ta bort katetern genom att dra ut långsamt. Kassera den använda katetern i hushållsavfallet.
- Sortera ytterförpackningen som kartong och lämna till återvinning.

### **MATERIAL**

Kateter röret	termoplastisk elastomer (TPS-SEBS)
Konnektor	termoplastisk elastomer (TPS-SEBS)
Ytbeläggning	Polyvinylpyrrolidon (PVP), NaCl
Styckförpackningar	Medicinska förpackningar av papper och PVC-fri plast som lämpar sig för EO-sterilisering
Ytterförpackningar	Kartong
Katetern är latexfri	
Katetern är PVC-fri	

### **VARNINGAR**

Anordning endast för engångsbruk och kan inte återanvändas. Måste kasseras efter användning. Använd inte katetern om förpackningen är öppen eller har skadats.

### **FÖRVARING**

Förvara i rumstemperatur (15-25 ° C). Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme och ljus. Hållbarhet 3 (tre) år från steriliseringsdatum.

### **STYCKFÖRPACKNING**

Styckförpackningen är märkt med storlek, produktnamn och tillverkare.

### **AVDELNINGSFÖRPACKNING**

Innehåller 40 stycken

Avdelningsförpackning är märkt med produktnamn, storlek, längd, LOT nummer, utgångsdatum, steriliserad med EO, för engångsbruk.

**TILLVERKARE** : ISTEM MEDIKAL Anadolu OSB Mah. 29 Ekim Cad. No:39 Malıköy, Sincan-Ankara/TURKIET

## Beställningsinformation

### Nelaton

Artikelnummer	Beskrivning
<b>15 cm</b>	
HCPPF 1508	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 8, 15 cm
HCPPF 1510	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 10, 15 cm
HCFPF 1512	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 12, 15 cm
HCFPF 1514	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 14, 15 cm
<b>20 cm</b>	
HCPPF 2006	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 6, 20 cm
HCPPF 2008	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 8, 20 cm
HCPPF 2010	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch10, 20 cm
HCFPF 2012	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 12, 20 cm
HCFPF 2014	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 14, 20 cm
HCFPF 2016	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 16, 20 cm
HCFPF 2018	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 18, 20 cm
<b>30 cm</b>	
HCPPF 3006	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 6, 30 cm
HCPPF 3008	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 8, 30 cm
HCPPF 3010	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 10, 30 cm
HCPPF 3012	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 12, 30 cm
<b>40 cm</b>	
HCMPF 4006	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 6, 40 cm
HCMPF 4008	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 8, 40 cm
HCMPF 4010	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 10, 40 cm
HCMPF 4012	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 12, 40 cm
HCMPF 4014	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 14, 40 cm
HCMPF 4016	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 16, 40 cm
HCMPF 4018	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 18, 40 cm
HCMPF 4020	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, nelaton, Ch 20, 40 cm

### Tiemann

<b>40 cm</b>	
HCTPF 4008	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch 8, 40 cm
HCTPF 4010	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch10, 40 cm
HCTPF 4012	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch 12, 40 cm
HCTPF 4014	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch14, 40 cm
HCTPF 4016	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch16, 40 cm
HCTPF 4018	HomeCath PVC-fri hydrofil tappningskateter, tiemann, Ch18, 40 cm

40 stycken/förpackningen

Utgåva 2020-04-27