

# Sage Munvårdssystem q4°

REF 6464-X



## Förpackningsinformation

### Innehåll:

- (2) set med (1) sugtandborste med natriumbikarbonat, (1) 7 ml Corinz munskölj
- (4) set med (1) sugsvabb med natriumbikarbonat, (1) 7 ml Corinz munskölj

### Avsedd användning:

**Sugtandborste:** Hjälper till att ta bort plack, skräp och munsekret.

**Sugsvabb:** Hjälper till att ta bort munsekret och skräp.

### Instruktioner:

**Användning av sugtandborste:** Använd tummarna för att trycka sönder förpackningen med lösning, öppna den sedan helt. Fäst sugtandborsten på sugslangen. Borsta tänderna och munhåla i 1 minut. Placera tummen över hålet på skaftet för att suga rent. Efter användning skall slangen spolas igenom ordentligt. Kassera.

**Användning av sugsvabb:** Använd tummarna för att trycka sönder förpackningen med lösning, öppna den sedan helt. Fäst sugsvabben på sugslangen. Rengör munnen i 1 minut. Placera tummen över hålet på skaftet för att suga rent. Efter användning skall slangen spolas igenom ordentligt. Kassera.

**Corinz munskölj:** Barn under 3 år: Rådgör med en tandläkare eller läkare. Barn under 12 år: Övervaka användningen. Använd enligt anvisningar från hälsovårdspersonal. Förvaras utom räckhåll för barn.

### Observera:

Tillåt inte patienten att bita i munvårdsprodukten. Använd ett bitblock om patienten har varierad medvetenhetsgrad eller har svårt att förstå instruktioner. Var försiktig med barn och patienter som inte svarar. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsåtgärder kan skada produkten och innebära risk för kvävning / aspirering. Om produkten återanvänds, kan det innebära att den kanske inte fungerar som den skall/ökad risk för korskontaminering.

Ej gjord av naturgummilatex

## Specifikationer

Produktnamn	Sage Munvårdssystem q4°
Produktnamn	6464-X
Beskrivning	Dagligt kit för munhygien som inkluderar produkter för användning var 4:e timme.
Tillverkarens ackreditering	ISO 13485:2016
Förfalldatum	24 månader från tillverkningsdatum
Längd på sugtandborste	18.4 cm
Längd på varje borst	8 mm
Längd på sugsvabb	18.4 cm
Längd på applikatorsvabb	15.9 cm
Mängd lösning i varje set	7 mL
Antal kit per avdelningsförpackning	20

# Sage Munvårdssystem q4°

## Beståndsdelar och fördelar

### Sugtandborste

Ultramjuka nylonborst	• Tar försiktigt bort tandplack, avlagringar och oralt sekret, som hyser luftvägspatogener
Mer än 3 100 borst eller kontaktpunkter	• Rengör och tar bort plack
Användarvänlig tumport	• Ger enkel kontroll av sugfunktion och möjliggör snabbt produktbyte.
Tre sugportar	• Förebygger blockering och håller en väg öppen för skräp att passera.
Finns med sughandtag	• Ger variabel sugreglering och möjliggör snabbt byte av produkter.
Ansluter direkt till sugslangar av standardtyp	• Underlättar maximalt sugtryck
Vinklat handtag	• Rengör munhålan bakre del.

### Sugsvabb

Sugsvabb	• Hjälper till att ta bort skräp och sekret mellan borstningar.
Behandlad med natriumbikarbonat	• Natriumbikarbonat förbättrar rengöringen och verkar uppfriskande i munhålan
Mjuka skumtoppar	• Mild mot ömtålig hud

### Innehåll i natriumbikarbonat

Vatten (aqua)  
Natriumbikarbonat  
Cellulosagummi  
Natriumlaurylsulfat  
Arom  
Natriumsackarin  
Natriumbensoat

### Innehåll i Corinz™ munskölj

Vatten (aqua)  
Glycerin  
Xylitol  
Arom  
Hydroxietylcellulosa  
Kaliumsorbat  
Cetylpyridinklorid  
Natriumsackarin  
Citronsyra  
Polysorbat 20  
Polysorbat 80  
Mentol

Sold by:

**MEDI PLAST**

Mediplast AB  
P.O.Box 1004  
SE-212 10 Malmö, Sweden  
Ph +46 40 671 23 00  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA  
t: 0808 189 0456  
**sageproductsglobal.com**

26300-SV 200402  
Copyright © 2019 Stryker

#### Detta dokument är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal.

Sjukvårdspersonal ska alltid förlita sig på sin egen professionella kliniska bedömning för att fatta beslut om hur en viss produkt ska användas vid behandling av en särskild patient. Stryker ger inte medicinska råd och rekommenderar att sjukvårdspersonalen utbildas i användningen av specifika produkter innan dessa används.

Den information som ges är avsedd att uppvisa omfånget av produkter som Stryker erbjuder. Sjukvårdspersonalen ska alltid ta hänsyn till respektive bipacksedel, produktetikett och/eller bruksanvisning innan en Stryker-produkt används.

Vissa produkter kanske inte är tillgängliga i vissa marknader och tillgängligheten kommer att bero på regelverk och/eller medicinsk praxis i varje enskild marknad. Kontakta närmaste Strykerombud för frågor angående tillgänglighet av Stryker-produkter i ditt område.

Stryker Corporation eller dess affärsenheter eller andra närstående företag använder eller har ansökt om följande varumärken eller tjänstemärken: Stryker. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare eller innehavare.

Produkterna som beskrivs är CE-märkta i enlighet med tillämpliga EU-förordningar och -direktiv.

Detta dokument är inte avsett för distribution utanför EU och Efta.