

Tappningskateter för kvinnor

Enkel och säker vart man än befinner sig

- Klar-att-använda kateter för enkel, snabb och säker kateterisering^{2,3,4}
- Ligger i vätska och kan användas direkt
- Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor
- Bred produktportfölj som passar olika preferenser och livsstilar
- Klar vätska, utan risk för fläckar

SpeediCath®

PVC-
& ftalatfri



SpeediCath® Compact Sa
Female / Femme
Coated catheter in sterile
solution with attached bag
Sonde viscosale stérile, avec
une poche attachée.
Length / Longueur 90 mm
Chiffre 12/4,0 mm

STERILE
LOT 2397653
2012-05
Cooplast A/S
3050 Denmark

Urinary catheter for intermittent
catheterization. Latex free
Sonde urinaire pour sondage
intermittent. Sans latex.

SpeediCath® Compact Plus
Sonde viscosale stérile, avec
une poche attachée.

SpeediCath® Compact
Sonde viscosale stérile, avec
une poche attachée.

SpeediCath®

Tappningskateter

Blåstömning med SpeediCath och RIK-metoden

Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma urinblåsan helt. För att undvika eventuella problem, kan blåsan tömmas med SpeediCath tappningskatetrar enligt RIK-metoden (ren intermitterent kateterisering).

SpeediCath förvaras i vätska - färdiga att användas direkt. Det unika hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till polerade kateterögon som ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering för urinröret. SpeediCath är PVC- och ftalatfri. Huvudmaterial: Polyuretan.

SpeediCath Compact Eve

Funktionen och den estetiska designen hos SpeediCath Compact Eve lyfter kvinnliga katetrar till en högre nivå där deras behov av säkerhet, enkelhet och diskretion uppfylls. Katetern öppnas enkelt och snabbt genom en liten vridning. Den trekantiga formen ger ett bra grepp om katetern vid öppning och användning. Längden är anpassad till kvinnans urinrör som är 3-5 cm, så den 9 cm långa katetern har en perfekt längd för effektiv ren intermitterent kateterisering. Vid behov kan en urinpåse enkelt och säkert kopplas till den inbyggda konnektorn. Efter användning kan den enkelt återförslutas och kasseras senare.



SpeediCath Compact Set

Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och integrerad steril urinpåse. En intuitiv och diskret design gör den enkel att använda, även för personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten. Högre livskvalité upplevs vid RIK¹.



SpeediCath Compact

Med sin unika design är SpeediCath Compact säker, enkel och diskret att hantera och bidrar till högre livskvalité vid RIK¹. Det integrerade handtaget gör kateteriseringen hygienisk. Längden är anpassad till kvinnans urinrör som är 3-5 cm, så med sina 7 respektive 9 cm har den perfekt längd för RIK.

SpeediBag Compact

Urinpåsen används tillsammans med SpeediCath Compact och SpeediCath Compact Plus. Efter tappning töms påsen direkt eller så för man ner katetern i påsen, knyter ihop den och tar den med för senare kassering.



SpeediCath Standard

Första hydrofila katetern som kunde användas direkt och som har satt standarden i 15 år. Förpackningen kan öppnas i båda ändar och användas som handtag. Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen.



SpeediCath Compact Eve	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	9*	281109
	○ 12	30	9*	281129
	● 14	30	9*	281149

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor 750 ml	● 10	20	9*	285209
	○ 12	20	9*	285229
	● 14	20	9*	285249

SpeediCath Compact	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	7*	285769
	● 08	30	7*	285789
	● 10	30	7*	285809
	○ 12	30	7*	285829
Plus Nelaton för kvinnor/flickor	● 14	30	7*	285849
	● 10	30	9*	288109
	○ 12	30	9*	288129
	● 14	30	9*	288149
Konnektor		30		285900

SpeediBag Compact	Förp styck	Volym ml	Coloplast art nr
	30	700	285920

SpeediCath Standard	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	20	285069
	● 08	30	20	285089
	● 10	30	20	285109
	○ 12	30	20	285129
	● 14	30	20	285149
	● 16	30	20	285169

* Kateterlängd exkl handtagsdel.

1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. 2. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995. 3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011. 4. Stensballe J et al. Eur Urol 2005;48:978-983.

Storlek i Charrière (CH) och färgkodning finns på avdelningsförpackningen för att säkerställa rätt val av kateter innan förpackningen öppnas.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care