

HydroTac® transparent

Transparent gelförband

Vid behandling av torra och lätt vätskande sår fungerar HydroTac transparent som en mjukgörare. Förbandet återfuktar såret samtidigt som det absorberar exsudat vilket ger en balsanserad sårmiljö. Den semi-permeabla ytan är genomsläpplig för luft, fukt och skyddar mot bakterier. Förbandet är mjukt, följsamt och bekvämt för patienten att bära.



- 1 HydroTac transparent Comfort har en bred häftkant för att underlätta fixering
- 2 Kan sitta på plats upp till 7 dagar
- 3 Transparent för visuell sårinspektion
- 4 För torra och lätt vätskande sår

Fördelar:

Enkel hantering
Mjuk patientkomfort
Skyddar såret
Transparent för visuell sårinspektion
Svalkar och lugnar huden



Egenskaper

HydroTac transparent skapar en fuktig sårmiljö och lämpar sig för behandling av torra och lätt vätskande sår. Förbandet kan sitta på plats i upp till 7 dagar beroende på sårets tillstånd. Förbandet kan bytas utan att irritera den nya vävnaden och utan att patienten känner smärta då förbandet inte fastnar i såret. Eftersom förbandet är transparent kan såret enkelt inspekteras utan förbandsbyte. HydroTac transparent har dessutom genom gelens mjukelastiska egenskaper en god polstringseffekt som skyddar såret från yttre påverkan.

Material

Hydrogelförband täckt med ett skikt av semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen består av polyuretan i matrixstruktur som innehåller ca 60% vatten. HydroTac transparent comfort har en akrylatbaserad häftmassa. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation och applicering

För behandling av torra och lätt vätskande sår med dålig läkningsfrekvens. Kan även användas på ytliga brännskador, ytliga traumatiska sår samt irriterad hud (smärta, utslag och klåda)

Kontraindikationer: Bör inte användas om klinisk infektion föreligger eller vid 3:e gradens brännskador. Skall ej användas av personer med intolerans mot ingående ämnen.

För fixering av HydroTac transparent rekommenderas fixeringsbinda eller tejp. HydroTac transparent comfort har däremot en häftkant som smidigt håller förbandet på plats.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
HydroTac® transparent Steril, enstycksförpackad	5 x 7,5 cm	685 905	10 st	12 AFP
	10 x 10 cm	685 906	10 st	12 AFP
	10 x 20 cm	685 907	10 st	6 AFP
	20 x 20 cm	685 908	10 st	6 AFP
HydroTac® transparent comfort Steril, enstycksförpackad	6,5 x 10 cm	685 928	10 st	8 AFP
	8 x 8 cm	685 925	10 st	8 AFP
	12,5 x 12,5 cm	685 926	10 st	4 AFP
	10 x 20 cm	685 927	10 st	4 AFP