

Hjälpmiddel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd

Art nr: 1168-S, 1168-M, 1168-L

Lakansskydd Lina är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Varumärke	Absorba		
Benämning	Absorba Lakansskydd Lina		
Art nr	1168-S	1168-M	1168-L
Totalyta	B 190 x L85 cm	B215 x L85 cm	B250 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm	B150 x L85 cm
Sängbredd	80-105 cm	110-120 cm	140-160 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1782 ml (+/- 56 ml)		
Antal produkter/förpackning	1 st		
Material	100% Bomull		
Ligg yta	95% Polyester, 5% Rayon		
Absorptionsskikt	Polyuretan		
Spärrskikt	50% Polyester, 50% Bomull		
Bäddflikar	100% Polyester		
Undersida	Ca 450 st		
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorterar efter lokal anvisning		
Kasseras	Rumstemperatur		
Förvaring	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		
Övrig information			

Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare loggan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. In under madrassen. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1168-S, 1168-M, 1168-L



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda