

Urimed[®] Cath



Kvarliggande kateter 100% silikon

Urimed[®] Cath

Kvarliggande kateterisering i 100% silikon


Silikon är ett material som rekommenderas i kvarliggande kateterar för långtidsbruk¹.

- Den 100% silikonkatetern är mjuk och **hypoallergen** vilket **minskar risk för irritation** och potentiell skada. Då den består helt av silikon har den en relativt **stor lumen** med en **minskad risk för avlagringar och blockeringar**.

I jämförelse med annat katetermaterial:

Silikonkatetrar hjälper till att minska risken för inkrustationer för **långtids kateteriserade patienter**.

- **100% Silikon** Foley katetrar föranleder patienter mindre traumatisk kateterisering och mindre risk för blockering².

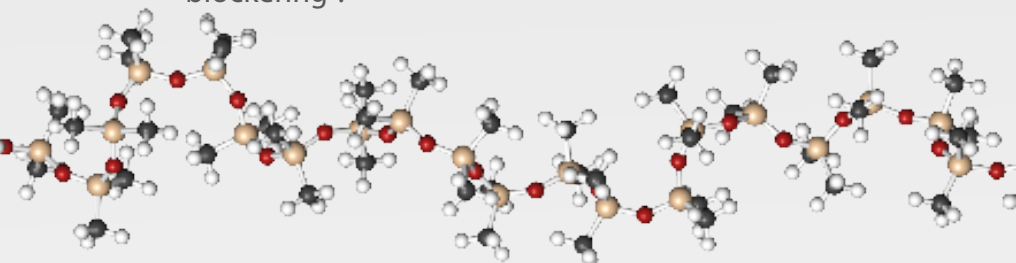

Silikon jämfört med latex

- Silikonkateterns innerlumen är bredare för ett större flöde jämfört med latex



- Med **Silikon**, pressningsprocessen resulterar i en kateter med **relativt tunna väggar och större lumen** i samma Charrière storlek jämfört med latex/silikonbelagda latex katetrar.

Resultat/sammanfattning:

100% Silikonkateter tömmer blåsan effektivare jämfört latexkateter av samma storlek.

Sources:


1 - Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (Eds): INCONTINENCE - Fourth International Consultation on Incontinence (ICI), Paris 2009
2 - 1997 British Journal of Urology.N.S. Morris, D.J.

Gjord av 100 % ren silikon för både vanlig blåstömning och postoperativ tillämpning

- **Urimed® Cath** sortimentet har **röntgentät tråd** i kateter inkl. spets.

Nelaton

Avsedd för kvinnor och män

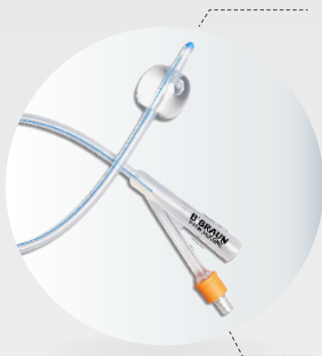

Två vägs kateter
För normal blåstömning

Tiemann


Utförd att förenkla kateterisering för män



Två vägs kateter
För normal blåstömning


Dufour

Med en tredje kanal som är avsedd för att spola bort blodkoagler och skräp efter prostata operation

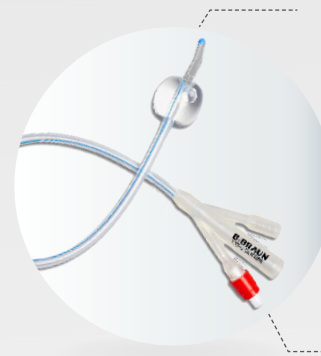

Tre vägs kateter
För blåstömning och rensning

« Enkel att hantera » - två stegsförpackad – steril - två sätt att öppna: från sidan eller ovanifrån

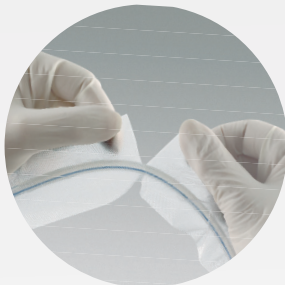


Alt 1: Riv av längs perforeringen på sidan, ca 10 cm ned från toppen



Alt 2: Riv av längs perforeringen på toppen. (longitudinelt)

Katetrar och påsar

- Urinpåsar
- Urinmätningssystem
- Blåsinstillation

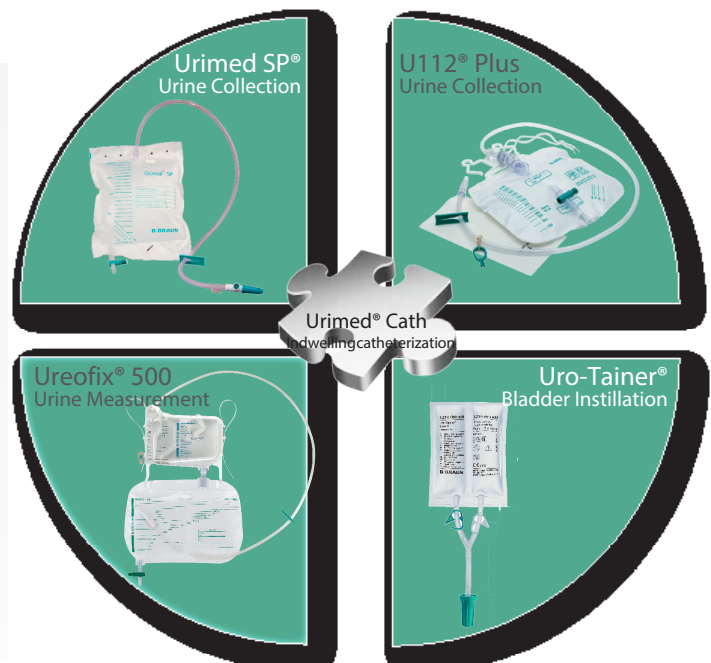

Urimed® Cath 100% Silikon



TIP/FUNNEL	PRODUCT	CATHETER CH/FR	BALLOON CAPACITY (ml)	REFERENCE	UNITS PER BOX
	Urimed® Cath Foley Nelaton	12	10	4563250	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	14	10	4563251	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	16	10	4563252	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	18	10	4563253	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	20	10	4563254	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	22	10	4563255	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	24	10	4563256	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	12	10	4563257	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	14	10	4563258	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	16	10	4563259	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	18	10	4563260	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	20	10	4563261	10
	Urimed® Cath Foley Dufour	16	40	4563262	10
	Urimed® Cath Foley Dufour	18	50	4563263	10
	Urimed® Cath Foley Dufour	20	60	4563264	10
	Urimed® Cath Foley Dufour	22	70	4563265	10
	Urimed® Cath Foley Dufour	24	80	4563266	10

Developed and manufactured by:
 B.Braun Medical S.A.S. | RCS Nanterre 562050856
 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt Cedex France
www.bbraun.com

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun.