

Produkt

Gypsona® S är ett vattenaktiverbart gips och spjälkningsförband. Avsett till alla typer av gipsbehandlingar och avgjutningar. Lättmodellerad med snabb immobilisering. Lätt att avlägsna med såg eller gipssax. Gypsona® S garanterar en snabb immobilisering, tack vare låg gipsförlust och jämn gipstäckning i väven.

Den runda spolen gör den blöta bindan lätthanterlig och ligger förpackade i plastfolie.

Material

Gasväv av 100% bomull impregnerad med högvärdig gipsmassa.

Bruksanvisning

1. Applicera stockinette tubförband och därefter polstervadd på området som ska gipsas.
2. Använd rumstempererat vatten (ca 20-25 grader).
3. Doppa rullen i vatten ca 3-5 sek.
4. Modellerings tid: 130-160 sek.
5. Vänta åtminstone 30 min innan patienten flyttas från gipsrummet.
6. Belastningsbart efter ca 24-36 tim, beroende på antal lager.

Förvaras torrt och svalt.

Orderinfo

Artikelnr.	Mått	Antal st. i fp.
7199336	5,00 cm x 3,00 m	40
7199355	8,00 cm x 3,00 m	60
7199356	10,00 cm x 3,00 m	40
7199357	12,00 cm x 3,00 m	40
7199358	15,00 cm x 3,00 m	40
7199359	20,00 cm x 3,00 m	20
7199400	10,00 cm x 20,00 m	1
7199405	12,50 cm x 20,00 m	1
7199402	15,00 cm x 20,00 m	1
7199404	20,00 cm x 20,00 m	1
7199800	10,00 cm x 25,00 m	1
7199802	15,00 cm x 25,00 m	1
7199803	20,00 cm x 25,00 m	1
7199801	12,00 cm x 25,00 m	1



©BSNmedical