

# Tubifast® Garment

## Skonsamma kläder

Elasticiteten på både längden och bredden ger full rörlighet och hög bekvämlighet


Mjuka och platta sömmar för att förhindra irritation hos känslig hud

Möjliggör aktiva dagar och rofyllda nätter

Bekväm, snabb, enkel och säker fixering av förband utan säkerhets-nålar och tejp

Bekvämt att använda under sovkläder och vanliga kläder

Kläderna finns som tröja med ärmarna, tröja med intergrerade vantar, strumpbyxor, leggings, sockor och vantar

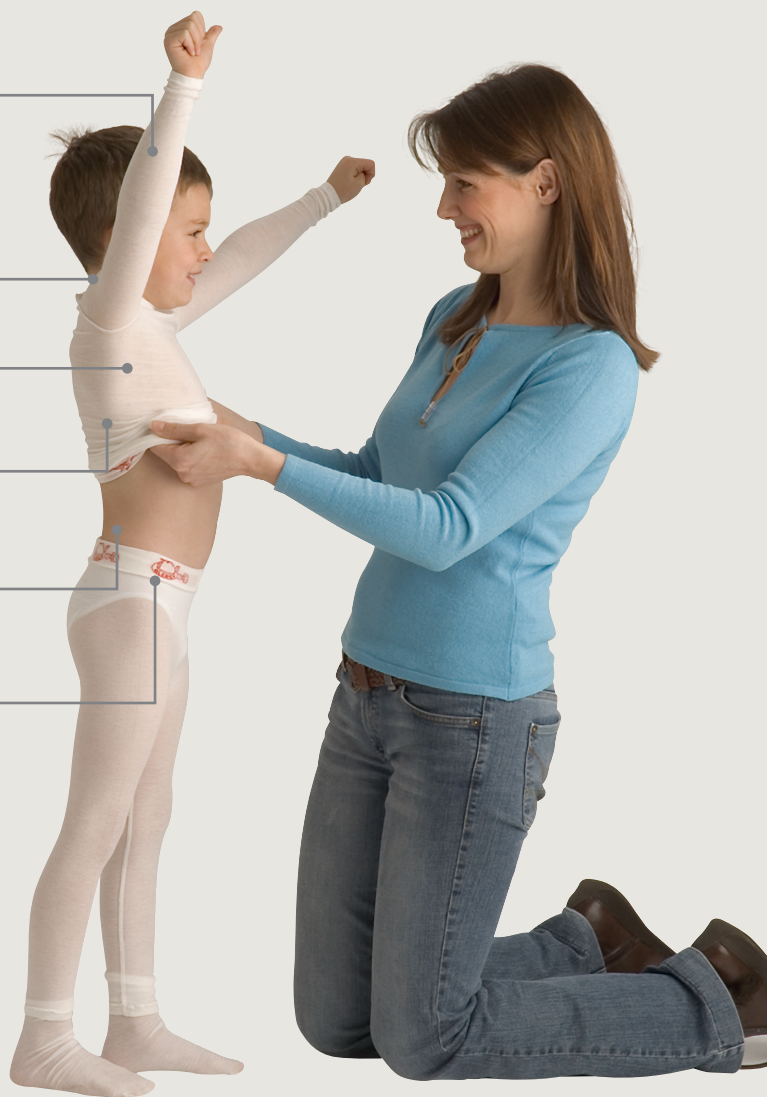

Tubifast Garments 2-Way Stretch är färdiga kläder för fixering av förband och som omslag vid behandling av eksem.

## Så fungerar Tubifast Garments 2-Way Stretch

Tubifast Garments 2-Way Stretch är färdiga kläder tillverkade av viskos med tunna elasthantrådar invävda i tyget både på längden och på bredden för att skapa elasticitet åt båda håll. Kläderna kan användas för att fixera förband och för att skydda huden. De kan även användas i samband med behandling av atopiskt eksem. Kläderna finns som tröja med ärm, tröja med intergrerade vantar (endast 6-24 månader), strumpbyxor, leggings, sockor och vantar till barn från 6 månader och uppåt. Tubifast Garments 2-Way Stretch ger en bekväm, snabb, enkel och säker fixering av förband utan tejp och säkerhetsnålar. Kläderna är bekväma att använda under sovkläder och vanliga kläder, de hjälper även till att främja aktiva dagar och rofyllda nätter.

### Tubifast Garments 2-Way Stretch

Tröja med intergrerade vantar	
Ålder	Art.nr.
6-24 månader	992007

Tröja med ärm	
Ålder	Art.nr.
2-5 år	992008
5-8 år	992009
8-11 år	992010
11-14 år	992011

Tights	
Ålder	Art.nr.
6-24 månader	992012

Strumpbyxor	
Ålder	Art.nr.
2-5 år	992013
5-8 år	992014
8-11 år	992015
11-14 år	992016

Sockor	
Ålder	Art.nr.
1 storlek: 2-14 år	992017

Vantar	
Storlek	Art.nr.
Barn XS	5922
Barn Small	5923
Barn Medium-Large/Vuxen Small	5921
Vuxen Medium-Large	5920

## Fördelar med Tubifast Garments 2-Way Stretch

- Elasticitet åt båda hållen möjliggör rörelsefrihet
- Mjuka och platta sömmar förhindrar irritation hos känslig hud
- Bekväm, snabb, enkel och säker fixering av förband
- Bekväma att bära under sovkläder och vanliga kläder

## Användningsområden

Tubifast Garments 2-Way Stretch kan användas för att fixera förband och för att skydda huden. Tubifast Garments 2-Way Stretch kan även användas för våta omslag tillsammans med lämplig mjukgörande kräm/salva vid behandling av atopiskt eksem. Applicera en mjukgörande kräm/salva på den drabbade huden och täck sedan med ett fuktigt lager Tubifast 2-Way Stretch. Mjukgörande kräm/salva tillsammans med ett fuktigt omslag håller huden fuktig och hjälper till att minska inflammation.<sup>1</sup> Ett skikt av fuktigt Tubifast Garments 2-Way Stretch eller Tubifast 2-Way Stretch tubbandage säkerställer den mjukgörande krämens/salvans effekt. Det fuktiga lagret kylar och lugnar huden vilket bidrar till minskad klåda.<sup>2</sup> Ett andra torrt lager som sedan appliceras håller patientens kläder torra och minskar risken för hudskador om patienten kliar sig. Torra omslag är en liknande process som våta omslag. Applicera en mjukgörande kräm/salva på den drabbade huden och täck sedan med ett enda torrt lager Tubifast Garments 2-Way Stretch eller Tubifast 2-Way Stretch tubbandage.

## Vänligen notera:

Det rekommenderas att Tubifast Garments 2-Way Stretch anpassas efter omfång så väl som ålder. Om du är osäker vid val av storlek, välj en storlek större (t.ex. välj en större storlek om barnet kommer att bära en blöja tillsammans med Tubifast Garment 2-Way Stretch).

Tubifast Garments 2-Way Stretch eller förpackningen innehåller inte naturgummilatex.

**Material** Viskos, Elastan och Polyamid

**Tvättinstruktioner** 



Referenser: **1.** Page B (2005) The Benefits of Tubifast Garments in the management of atopic eczema. British Journal of Nursing 14 (5); 289-92. **2.** Cork MJ, Complete Emollient Therapy. The National Association of Fundholding Practices Official Yearbook. BPC Waterlow, Dunstable 1998: 159-168

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Molnlycke Health Care name and logo, Safetac and Tubifast Garment are registered trademarks of Molnlycke Health Care AB.

  
**Molnlycke®**