



Actico® UlcerSys – kompressionsstrumpa

Actico® UlcerSys är ett medicinskt tvålayers kompressionskit som används för behandling av och förebygger återkomst av venösa besvär.

Tre strumpor i ett kit

Två innerstrumpor (vardera 10-14 mmHg) som kan användas dygnskontinuerligt samt en ytterstrumpa (26-34 mmHg) för ökad kompression under dagtid.

Finns i kombinationerna:

vit innerstrumpa + beige ytterstrumpa samt beige innerstrumpa + svart ytterstrumpa.

Innerstrumpan kan användas direkt över sårkompress och skyddar känslig hud.

Kompression:

Tvålayers kompressionskit som tillsammans ger ca 40 mmHg vilket uppfyller en klass 1-3 strumpa med ca 40 mmHg tryck vid ankeln. Motsvarar trycket i kortsträcks- eller lågelastisk binda. Låg kompression i foten förhindrar ödem i framfoten.

Strumpa	mmHg	KKL
1 innerstrumpa	10-14	1
1+1 innerstrumpa	20-28	2
1 innerstrumpa + 1 ytterstrumpa	ca 40	3

Vid kontinuerlig behandling ger strumpan effektivt arbetstryck vid rörelse dagtid och väl accepterat statiskt tryck nattetid.

Material:

Innerstrumpa: 70 % polyamid, 30 % elasthan.
Ytterstrumpa: 65 % polyamid, 35 % elasthan

Tvätt:

Innerstrumpa: Maskintvätt i 60°C.

Ytterstrumpa: Maskintvätt i 40°C.

Tvåtråd finns både på strumpa och i förpackning.

Förpackning:

Kit: kartong med 2 innerstrumpor och 1 ytterstrumpa.


Innerstrumpa: påse med 3 innerstrumpor i samma färg.



Fotled: cB



Vad: cC

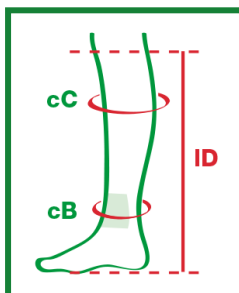

Benlängd: ID

Indikationer:

- För behandling av venösa bensår efter ödemreduktion
- Förebyggande av återkommande kroniska venösa sår

Tack vare kompressionsegenskaperna (KKL3) kan Actico® UlcerSys dessutom användas som kompressionsstrumpa för underbenet:

- Vid hudsjukdomar på grund av blodstockning (t.ex. eksem, pigmentförändringar, lipodermatoskleros, atrophie blanche)
- Vid venösa ödem
- För behandling av posttrombotiskt syndrom
- För efterbehandling vid behandling och operationer av åderbräck
- Efter venuttagning för bypassoperation (hjärtoperation)

Kontraindikationer:

- Svår perifer arteriell ocklusiv sjukdom
- Inkompenenserad hjärtsvikt
- Septisk flebit
- Phlegmasia caerulea dolens
- Diabetessår
- Sensibilitetsrubbingar i huden
- Överkänslighet mot materialet

Storlekar:

För att finna rätt storlek är där tre mått som måste beaktas:

- Fotled: **cB**
- Vad: **cC**
- Benlängd: **ID**

Strumpan finns i:

- 5 storlekar – S, M, L, XL, XXL
- 2 längder – standard och lång
- 2 färgkombinationer – vit/beige samt beige/svart



Förpackning innehållande tre strumpor, två innerstrumpor samt en ytterstrumpa:

Art.nr.	Strl	cB(cm)	cC(cm)	Benlängd(cm)	Avd.fp.	Trp.fp.
Beige kompressionsstrumpa/ vita innerstrumpor/ Längd Standard						
32 510	S	19-21	31-39	38-42	1	16
32 512	M	21-23,5	33-41	38-42	1	16
32 514	L	23-27	35-44	38-42	1	16
32 516	XL	27-32	39-48	38-42	1	16
32 518	XXL	32-37	43-52	38-42	1	16
Beige kompressionsstrumpa/ vita innerstrumpor/ Längd Lång						
32 511	S	19-21	31-39	> 42	1	16
32 513	M	21-23,5	33-41	> 42	1	16
32 515	L	23-27	35-44	> 42	1	16
32 517	XL	27-32	39-48	> 42	1	16
32 519	XXL	32-37	43-52	> 42	1	16
Svart kompressionsstrumpa/ beige innerstrumpor/ Längd Standard						
39 710	S	19-21	31-39	38-42	1	16
39 712	M	21-23,5	33-41	38-42	1	16
39 714	L	23-27	35-44	38-42	1	16
39 716	XL	27-32	39-48	38-42	1	16
39 718	XXL	32-37	43-52	38-42	1	16
Svart kompressionsstrumpa/ beige innerstrumpor/ Längd Lång						
39 711	S	19-21	31-39	> 42	1	16
39 713	M	21-23,5	33-41	> 42	1	16
39 715	L	23-27	35-44	> 42	1	16
39 717	XL	27-32	39-48	> 42	1	16
39 719	XXL	32-37	43-52	> 42	1	16

Förpackning innehållande tre innerstrumpor:

Art.nr.	Strl	cB(cm)	cC(cm)	Benlängd(cm)	Avd.fp.	Trp.fp.
3 vita innerstrumpor/ Längd Standard						
32 530	S	19-21	31-39	38-42	3	150
32 532	M	21-23,5	33-41	38-42	3	150
32 534	L	23-27	35-44	38-42	3	150
32 536	XL	27-32	39-48	38-42	3	150
32 538	XXL	32-37	43-52	38-42	3	150
3 vita innerstrumpor/ Längd Lång						
32 531	S	19-21	31-39	> 42	3	150
32 533	M	21-23,5	33-41	> 42	3	150
32 535	L	23-27	35-44	> 42	3	150
32 537	XL	27-32	39-48	> 42	3	150
32 539	XXL	32-37	43-52	> 42	3	150
3 beige innerstrumpor/ Längd Standard						
39 740	S	19-21	31-39	38-42	3	150
39 742	M	21-23,5	33-41	38-42	3	150
39 744	L	23-27	35-44	38-42	3	150
39 746	XL	27-32	39-48	38-42	3	150
39 748	XXL	32-37	43-52	38-42	3	150
3 beige innerstrumpor/ Längd Lång						
39 741	S	19-21	31-39	> 42	3	150
39 743	M	21-23,5	33-41	> 42	3	150
39 745	L	23-27	35-44	> 42	3	150
39 747	XL	27-32	39-48	> 42	3	150
39 749	XXL	32-37	43-52	> 42	3	150

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.