


# Produktfakta TENA Men Nivå 1-3

## Användningsområde

TENA Men Nivå 1-3 är läckagesäkra, bekväma och diskreta herrskydd med en design utformad efter den manliga anatomin. För mindre urinläckage. Ingår i TENA Men sortimentet med skydd i sex absorptionsnivåer och två modeller.

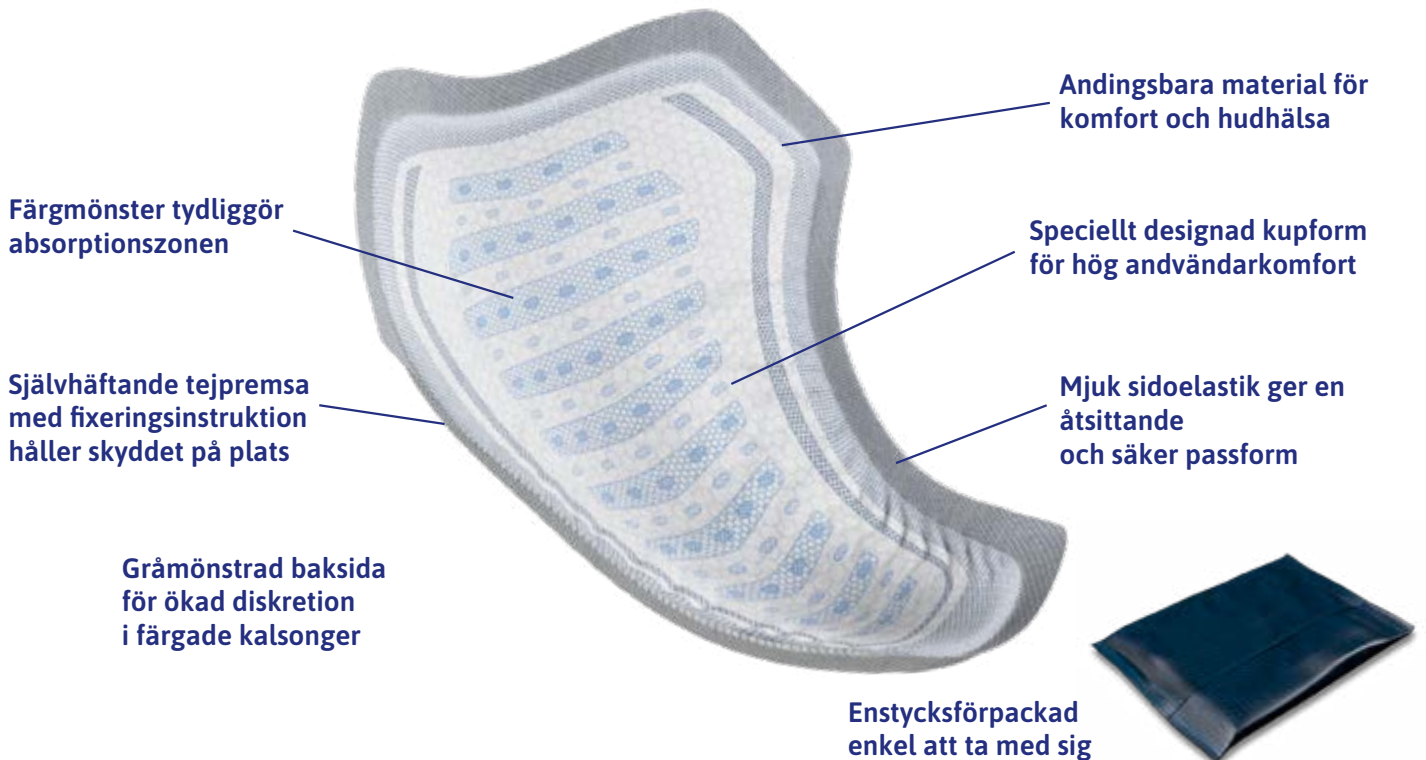

## Produktegenskaper

TENA Men Nivå 1-3 har en absorberande kärna med superabsorbenter. Urinen absorberas snabbt, sprids och lagras i botten av skyddet, vilket ger en hög yttorrhet. Baksidesmaterialet förhindrar genomvättning.

TENA Men Nivå 1-3 är försedd med mjuk och stadig elastik i sidorna som ökar både läckagesäkerheten, kupformningen och bekvämligheten.

TENA Men Nivå 1-3 har Odour Control™ som hjälper till att förhindra oönskad lukt. Textilliknande andningsbara material runt hela produkten och andningsbart spärrskikt ger ökad komfort och bidrar till att minska risken för hudproblem.

TENA Men Nivå 1-3 fixeras med hjälp av tejp på produktens baksida i tätt åtsittande kalsonger. Fixeringstejpen håller skyddet säkert på plats utan att lämna häftrester på textilier. Tejpens skyddspapper är märkt med produkt-namn/storlek och illustrationer som visar vilken del av skyddet som är uppåt och hur det fixeras.



# Produktfaktablad TENA Men Nivå 1-3



## TENA Men

Uppsugningsnivå/storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptionskapacitet	Essity Art.nr
Nivå 1	23	20	10	12	96	96 ml	287 ml	75 06 61
Nivå 2	27	23,6	17	10	60	167 ml	501 ml	75 07 96
Nivå 3	27	23,6	31	8	48	239 ml	717 ml	75 08 56



Absorberande kärna låser in läckage effektivt



Bekväm form speciellt framtagen för mannens anatomi



Enstycksförpackad



Odour Control hjälper till förhindra oönskad lukt



Tunt skydd för extra diskretion



Sitter säkert och diskret i åtsittande kalsonger

## Användarinstruktion



Ta ut skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det.

Dra bort skyddspappret på baksidan.

Placera skyddet över penis och pung och fäst i åtsittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

# Produktfaktablad TENA Men Nivå 1-3

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven; Polypropylen (PP)

Funktion: Hålla huden torr, mjukhet

### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt och motverka att urin tränger tillbaka upp till ytan

### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Absorbera och hålla kvar urin

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### BARRIÄRELASTIK

Syntetiskt gummi; Polyisopren

Funktion: Förhindra läckage, ge bra kupform och passform, samt god komfort

### SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För samtliga TENA Men gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)



**essity**

TENA  
an Essity brand

