



Artikelnummer 1000021281



Tejpskydd, ABENA Slip, S2, gul färgkod, Premium

- ✓ Högeffektiv kärna med Top-Dry-teknik
- ✓ 360° läckagebarriärer som förhindrar läckage runt hela produkten
- ✓ Svängda benresårer för optimal passform
- ✓ Våtindikator med rutsystem för läckagemätning
- ✓ Stöd för frisk hudbalans



Produktbeskrivning

ABENA Slip är vårt förstklassiga sortiment av helt andningsbara och anatomiskt formade allt-i-ett-skydd med tejp mot läckage i samband med måttlig till kraftig inkontinens. Den högeffektiva kärnan med Top-Dry-teknik skapar snabb absorption och en torr yta även efter flera läckage. En kombination av olika barriärer (synliga och osynliga) och resårer (böjda benresår) ger 360-graders läckageskydd runt hela produkten. Tillsammans hjälper dessa funktioner till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden. Odörssystemet minskar risken för oönskad lukt. Den elastiska kombitejpen håller hög kvalitet med dubbel tejpfunktion och gör det enkelt att justera skyddet tills det sitter säkert och bekvämt. Med hjälp av våtindikatorn och rutsystemet kan användare och vårdgivare hitta den produkt som har rätt absorptionsnivå, vilket också underlättar vid byten. Produkterna är dermatologiskt testade och bär det nordiska Svanenmärket.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Tejpskydd
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Slip
Storlek	S2
Färg	Vit
Egenskaper	Gul färgkod
Material	Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, elastisk kombitejp, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Längd/djup	690 mm
Bredd	520 mm
Höftmått	60-85 cm
Tolerans	+/- 10%
Absorption (Rothwell)	1711 ml
Praktisk absorption	570 ml
Kön	Unisex
Kvalitetsnivå	Premium
Märkningar	CE, MD, Svanenmärket, UKCA
Svanenmärkets licensnr.	5023 0001
CE-klass	Klass I

Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Förvaras utom räckhåll för barn.
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller brännas.

Bruksanvisning

Allt-i-ett-skydd med tejp för urinläckage vid måttlig till kraftig inkontinens, designade för extra krävande situationer och för sängliggande patienter. Det är enkelt att hitta rätt storlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem. Det är viktigt att utgå från höftmättet för att hitta rätt storlek och att välja rätt absorptionsnivå för att undvika läckage. Vik skyddet på längden med spärrskiktet utåt, så att det formas till en skål. Dra på skyddet framifrån. Vik ut framkanten av skyddet, och skapa som en kanal mellan benen. Fäst de nedre tejpbitarna vinklade något uppåt på båda sidor och fäst sedan de övre tejpbitarna vinklade nedåt för säker och bekväm passform. Det går att ta på produkterna i både upprätt position (användaren själv eller med hjälp) och liggande position. Se fixeringsguiden i vår broschyr för detaljerad information.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	84 st	70.6 cm	40 cm	18.7 cm	5713571000052
fp	28 st	38 cm	18 cm	22 cm	5713571000045
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



360-gradiga läckagespärar i grenen och runt den absorberande kärnan, hjälper till att förhindra läckage och ger en optimal passform.



Produkten är fullt andningsbar, vilket gör den bekväm att använda under längre tid. Hjälper till att bibehålla hudens integritet.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.




Produkten har flexibel tejp för att säkerställa bästa möjliga kombination av komfort, passform och läckageskydd. Den blå dubbeltejpen garanterar en extra möjlighet till ompositionering/justering.




Den unika strukturen i vår högpresterande kärna är designad för snabb spridning och inkapsling av urin, vilket resulterar i en torr yta även efter flera miktationer.




Odörkontroll är mycket viktigt för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.




Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.




Våtindikatorn är en fukt känslig remsa som ändrar färg eller bleknar bort för att indikera när det är dags att byta produkt.




En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera miktationer. Det hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsystem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto högre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.



Påsen består av 30 % PCR, vilket innebär att den är tillverkad av plastmaterial som återvunnits från konsumenter. På så sätt kan vi minska vårt plastavfall och hjälpa till att ta hand om miljön.

