

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

INSTAORETT™-Debrideringsverktyg

1. Avlägsna den sterila förpackningspåsen, genom att dela isär plast och papper i ena änden.
2. Tillse att produkten är hel före användning.
3. Då produkten har vassa kanter, iakttag försiktighet och använd skyddshandskar.
4. INSTAORETT™-Debrideringsverktyg är avsedd att användas för att avlägsna exempelvis biofilm, hudrester, fibrin och död hud, i och omkring sår.
5. Efter användandet, förpassa INSTAORETT™-Debrideringsverktyg i avsett kärl för sjukhusavfall.

Exempel på användningsområde i och omkring sår



INSTAORETT™-Debrideringsverktyg

- CE-märkt
- Steril
- För engångsanvändning

Varunummer:

- 769074001 - INSTAORETT™
- med skrapa+krok
- 769074002 - INSTAORETT™
- med dubbel sked



Vid frågor, kontakta oss.

Ring +46 (0)8 – 70 00050 eller skicka ett mail till hello@s2m.se
S2Medical AB, Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping, Sverige
www.s2m.se