


Sorbact® Ribbon

Bakterie- och svampbindande sårförband

- ✓ Förebygger och behandlar sårinfektioner
- ✓ Lämplig även för behandling av svampinfektioner i hudveck
- ✓ Effektiv mot de vanligaste resistenta patogenerna¹
- ✓ Kan klippas till lämplig storlek
- ✓ Lätt att ta bort

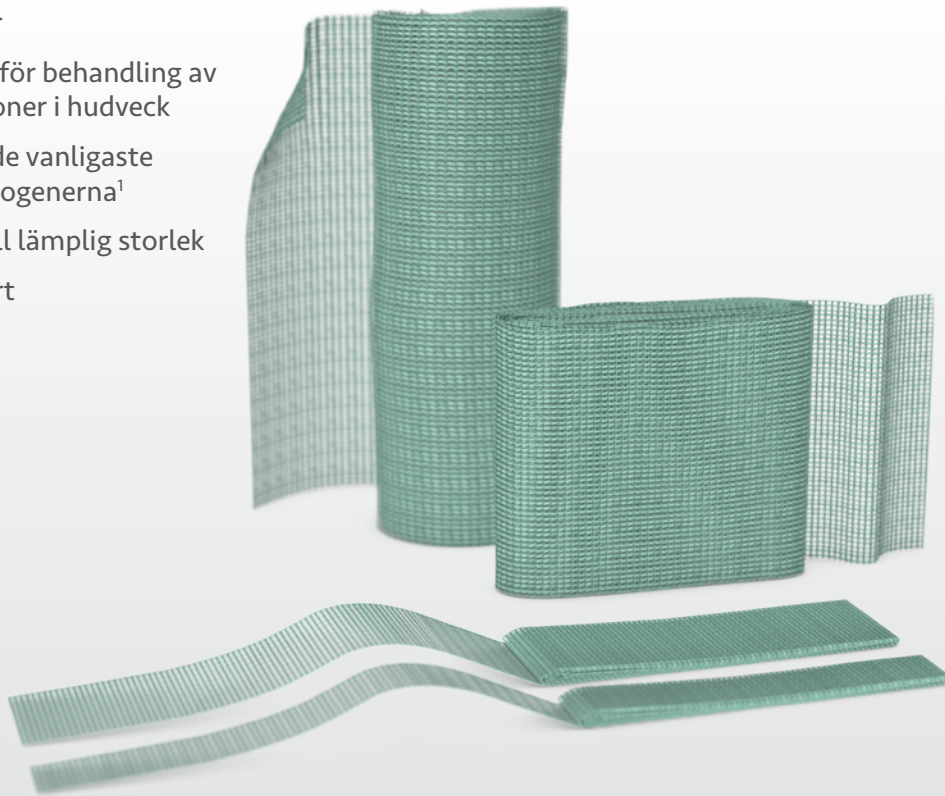

Minskar den mikrobiella belastningen i sårhålor och fistlar

Sorbact® Ribbon är en DACC™ impregnerad bakterie- och svampbindande bomullsväv baserad på Sorbact® Technology. Sorbact® Ribbon förebygger och behandlar sårinfektioner och underlättar sårläkningsprocessen. Den är lämplig som en sårfillare och låter sårvätska passera till ett sekundärförband. Sorbact® Ribbon kan också placeras i hudveck för att behandla svampinfektioner (intertrigo).

Avsedd användning

Sorbact® Ribbon är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom operationsår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Ribbon kan användas på ytliga och djupa sår, såsom kaviteter och fistlar. Sorbact® Ribbon är också avsedd att behandla svampinfektioner i hudveck (intertrigo).

Bruksanvisning – sårhantering

1. Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet får överlappa sårkanterna om det krävs.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Om så behövs, klipp med aseptisk teknik förbandet tvärs över till önskad längd. Klipp inte förbandet ovanför såret. Kassera oanvänt förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan, för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. I kaviteter eller fistlar, undvik att packa tätt.



Lämna alltid en del av förbandet utanför kaviteten/fistelns så att förbandet lätt kan avlägsnas. Om förbandet klipps, lämna alltid den klippta änden utanför såret för att undvika kvarvarande trådar.

6. Applicera ett sekundärförband som är lämpligt för mängden exsudat t.ex. ett skumförband, en absorberande dyna eller ett gelande fiberförband och fixera.
7. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till 7 dagar.

Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårslukningen störs.

Sorbact® Ribbon kan användas i samband med kompressionsbehandling. Sorbact® Ribbon är MRI-säker.

Bruksanvisning – svampinfektion

1. Förbered det påverkade området i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandsstorlek för det påverkade området. Om så behövs, klipp förbandet tvärs över till önskad längd.
3. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela den påverkade ytan för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet.
4. För fixering kan underkläder eller hudvänlig häfta användas. Häftan ska fästas utanför det påverkade området.
5. Dagligt förbandsbyte i samband med inspektion och regelbundna hygienrutiner rekommenderas.



6. Fortsätt att använda förbandet i 2–3 dagar efter att symtomen försvunnit för att undvika återfall.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Sorbact® Ribbon

Art. nr.	Storlek	St./frp.
98115-10	1 x 50 cm	10
98116-10	2 x 50 cm	10
98120	5 x 200 cm	10
98119	10 x 200 cm	10



1. Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. *EWMA 2020*. EP006.

Läs mer på sorbact.se

Sorbact® Technology är en unik innovation som används i våra avancerade sårbehandlingsprodukter för att förebygga och behandla sårinfektioner. Produkter med Sorbact® Technology hjälper patienter i mer än 65 länder under varumärkena Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® och Cutimed® Sorbion® Sorbact®.