

Sorbact® Absorption

Bakterie- och svampbindande sårförband

- ✓ Förebygger och behandlar sårinfektioner
- ✓ Avlägsnar bakterier, svamp och endotoxiner på ett säkert sätt
- ✓ Effektiv mot de vanligaste resistenta patogenerna¹
- ✓ Lätt att använda



Minskar den mikrobiella belastningen i måttligt till rikligt vätskande sår

Sorbact® Absorption är ett bakterie- och svampbindande sårförband baserat på Sorbact® Technology. Förbandet består av ett DACC™-impregnerat Sorbact® sårkontaktlager i kombination med en absorberande kärna, som absorberar och håller kvar exsudat. Sorbact® Absorption förebygger och behandlar sårinfektioner och underlättar sårhelingsprocessen.



Binder • Hämmar • Avlägsnar

En unik, kliniskt beprövad teknologi inom sårinfektionshantering. Baserat på en fysisk verkningsmekanism, avlägsnar förband med Sorbact® Technology bakterier, svamp och endotoxiner på ett säkert sätt för att förebygga och behandla sårinfektioner utan att frigöra aktiva ämnen i såret.

Avsedd användning

Sorbact® Absorption är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade måttligt till rikligt vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Absorption kan användas på ytliga sår.

Bruksanvisning

1. Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm. Klipp inte i förbandet.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Applicera förbandet. Se till att det gröna kontaktlagret kommer i direktkontakt med hela

sårytan för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet.

5. Fäst med ett elastiskt bandage eller hudvänlig tejp.
6. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till 7 dagar.
7. Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sår-läkningen störs.

Sorbact® Absorption kan användas i samband med kompressionsbehandling.

Sorbact® Absorption är MRI-säker. Ta bort Sorbact® Absorption före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.



För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Sorbact® Absorption

Art. nr.	Storlek	St./frp.
98226-10	7 x 9 cm	10
98225	10 x 10 cm	10
98223	10 x 20 cm	10



1. Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. *EWMA* 2020. EP006.

Läs mer på sorbact.se

Sorbact® Technology är en unik innovation som används i våra avancerade sårbehandlingsprodukter för att förebygga och behandla sårinfektioner. Produkter med Sorbact® Technology hjälper patienter i mer än 65 länder under varumärkena Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® och Cutimed® Sorbion® Sorbact®.