



Packskynte Sterisheet® Interleaved

160 Soft Crepe/160 Soft Crepe

Sterimed Ref.nr.	Storlek	Färg	Förpackning st/ytterfp
0237050	50x50 cm	Vit/grön	400
0237060	60x60 cm	Vit/grön	300
0237075	75x75 cm	Vit/grön	126
0237080	80x80 cm	Vit/grön	100
0237100	100x100 cm	Vit/grön	100
0237120	120x120 cm	Vit/grön	76

Avsedd användning

Sterisheet® Packskynte för användning på sterilcentraler och andra sjukvårdsinrättningar, och där steriliseringsprocesser utförs. Erbjuder skydd för medicinteknisk utrustning mot biologisk- och kemisk kontamination under perioden från sterilisering till användning.

Material

Varvade Sterisheet® Soft Crepe, vit respektive grön. Båda 60 g/m². 100 % kräppad cellulosa.

Funktion

Lämplig för sterilisering i ånga, EO och lågtemperatur.

Passar för små och medelstora galler. Rekommenderad gallervikt upp till 3 kg.

Kvalitetskrav

- CE-märkt enligt Medical Device Regulation EU 2017/745, MDR klass I.
- Tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017
- STERIMED är EN ISO 13485:2016 certifierad
- Sterisheet® följer krav för Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC
Pappersmassa 100% klorfritt. FSC eller PEFC ursprung.

Förvaring innan användning

Förvaring på en sval, torr plats borta från direkt naturligt solljus, starkt artificiellt ljus och UV-strålning.

Pappkartonger ska aldrig ställas direkt på golvet.

Produkterna ska förvaras där de inte utsätts för extrema temperaturförändringar så som i kontakt med upphettade objekt, lufthål eller kalla väggar.

AAMI ST79 "Omfattande guide för ångsterilisering och sterilitetsförsäkring på sjukvårdsinrättningar" rekommendationer:

Att innan användning ha förpackningsmaterialen i rumstemperatur (20 °C till 23 °C) och vid en relativ fuktighet på 30 % till 60 % under minst 2 timmar, är god praxis för optimal användningsprestanda.

Hållbarhetstid:

Förutsatt att ovanstående lagringsvillkor är uppfyllda, är hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.

Förvaring efter användning

Sterilförpackningar måste förvaras på ett ställe som är avsett för sterila medicintekniska produkter, utan påverkan från direkt solljus, fukt och alla typer av föroreningar.

Förvaringstiden ska fastställas i enlighet med verksamhetens rutiner.



Tillverkare:

STERIMED SRO

Evropska 866

664 42 Modrice

Tjeckien

2023-07-04