



Packskyнке Sterisheet® Reinforced

260 förstärkt cellulosa/357 NW

Sterimed Ref.nr.	Storlek	Färg	Förpackning st/ytterfp
0F08060	60x60 cm	Blå/Grön	300
0F08075	75x75 cm	Blå/Grön	126
0F08090	90x90 cm	Blå/Grön	90
0F08100	100x100 cm	Blå/Grön	90
0F08120	120x120 cm	Blå/Grön	70

Avsedd användning

Sterisheet® Packskyнке för användning på sterilcentraler och andra sjukvårdsinrättningar, och där steriliseringsprocesser utförs. Erbjuder skydd för medicinteknisk utrustning mot biologisk- och kemisk kontamination under perioden från sterilisering till användning.

Material

Varvade Sterisheet® cellulosa(80 %) förstärkt med syntetiska fiber, 60 g/m² blå och Sterisheet® syntetiska fiber non-woven(cellulosa med 30 % syntetiska fiber och 20 % syntetiskt bindemedel), 57 g/m² grön.

Funktion

Lämplig för sterilisering i ånga, EO och lågtemperatur.

Passar för små, medelstora och stora galler. Rekommenderad gallervikt upp till 6-10 kg.

Kvalitetskrav

- CE-märkt enligt Medical Device Regulation EU 2017/745, MDR klass I.
- Tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017
- Sterimed är EN ISO 13485:2016 certifierad
- Sterisheet® följer krav för Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC Pappersmassa 100% klorinfritt. FSC eller PEFC ursprung.

Förvaring innan användning

Förvaring på en sval, torr plats borta från direkt naturligt solljus, starkt artificiellt ljus och UV-strålning.

Pappkartonger ska aldrig ställas direkt på golvet.

Produkterna ska förvaras där de inte utsätts för extrema temperaturförändringar så som i kontakt med upphettade objekt, lufthål eller kalla väggar.

AAMI ST79 "Omfattande guide för ångsterilisering och sterilitetsförsäkring på sjukvårdsinrättningar" rekommendationer:

Att innan användning ha förpackningsmaterialen i rumstemperatur (20 °C till 23 °C) och vid en relativ fuktighet på 30 % till 60 % under minst 2 timmar, är god praxis för optimal användningsprestanda.

Hållbarhetstid:

Förutsatt att ovanstående lagringsvillkor är uppfyllda, är hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.

Förvaring efter användning

Sterilförpackningar måste förvaras på ett ställe som är avsett för sterila medicintekniska produkter, utan påverkan från direkt solljus, fukt och alla typer av föroreningar.

Förvaringstiden ska fastställas i enlighet med verksamhetens rutiner.



Tillverkare:

STERIMED SRO

Evropska 866

664 42 Modrice

Tjeckien

2023-07-04