



## Packskynke Sterisheet® Bonded 4

svetsade 355 SMS/355 SMS

Sterimed Ref.nr.	Storlek	Färg	Förpackning st/ytterfp
0F28075	75x75 cm	Blå/Grön	40
0F28090	90x90 cm	Blå/Grön	30
0F28100	100x100 cm	Blå/Grön	30
0F28120	120x120 cm	Blå/Grön	20
0F28137	137x137 cm	Blå/Grön	20

### Avsedd användning

Sterisheet® Packskynke för användning på sterilcentraler och andra sjukvårdsinrättningar, och där steriliseringsprocesser utförs. Erbjuder skydd för medicinteknisk utrustning mot biologisk- och kemisk kontamination under perioden från sterilisering till användning.

### Material

Sammansvetsade Sterisheet® 355 SMS 55 g/m<sup>2</sup> blå och 355 SMS 55 g/m<sup>2</sup> grön.  
100 % syntetiska fiber i polypropylen.

### Funktion

Lämplig för sterilisering i ånga, EO och plasma.  
Passar för stora galler. Rekommenderad gallervikt 10-13 kg.

### Kvalitetskrav

- CE-märkt enligt Medical Device Regulation EU 2017/745, MDR klass I.
- Tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017
- Sterimed är EN ISO 13485:2016 certifierad
- Sterisheet® följer krav för Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC Pappersmassa 100% klorinfritt. FSC eller PEFC ursprung.

### Förvaring innan användning

Förvaring på en sval, torr plats borta från direkt naturligt solljus, starkt artificiellt ljus och UV-strålning.

Pappkartonger ska aldrig ställas direkt på golvet.

Produkterna ska förvaras där de inte utsätts för extrema temperaturförändringar så som i kontakt med upphettade objekt, lufthål eller kalla väggar.

AAMI ST79 "Omfattande guide för ångsterilisering och sterilitetsförsäkring på sjukvårdsinrättningar" rekommendationer:

Att innan användning ha förpackningsmaterialen i rumstemperatur (20 °C till 23 °C) och vid en relativ fuktighet på 30 % till 60 % under minst 2 timmar, är god praxis för optimal användningsprestanda.

### Hållbarhetstid:

Förutsatt att ovanstående lagringsvillkor är uppfyllda, är hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.

### Förvaring efter användning

Sterilförpackningar måste förvaras på ett ställe som är avsett för sterila medicintekniska produkter, utan påverkan från direkt solljus, fukt och alla typer av föroreningar.

Förvaringstiden ska fastställas i enlighet med verksamhetens rutiner.



Tillverkare:

STERIMED SRO

Evropska 866

664 42 Modrice

Tjeckien

2023-07-04