

# HUMID-VENT® FILTER COMPACT

Kombinerad fukt-/värmväxlare och bakterie-/virusfilter med port för CO<sup>2</sup> mätning

Artikelnr: Rakt - HU-19402.

Vinklat - HU-18402. Hygienförpackat

- Tidalvolym 150 - 1000 ml
- Dead-space 35 ml (rakt), 38 ml (vinklat)
- Vikt 31 g (rakt), 32 g (vinklat)
- Kopplingar 15-22/15 mm, ISO 5356-1
- Mediumbefuktning: Hygroskopiskt, naturligt mikrowellpapper  
Bakteriostatiskt
- Mediumfiltrering: Hydrofobiskt, elektrostatiskt bipolärt ladde fibrer
- Flödesmotstånd:  
vid 60 l / min - max 1,8 cm H<sub>2</sub>O
- Befuktningseffektivitet:
 

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Vattenförlust:                 |
| vid V <sub>T</sub> 500 ml - 31 mg H <sub>2</sub> O / l luft  | 6 mg H <sub>2</sub> O / l luft |
| vid V <sub>T</sub> 750 ml - 30 mg H <sub>2</sub> O / l luft  | 7 mg H <sub>2</sub> O / l luft |
| vid V <sub>T</sub> 1000 ml - 30 mg H <sub>2</sub> O / l luft | 8 mg H <sub>2</sub> O / l luft |
- Testmetod: ISO 9360
- Filtreringseffektivitet: 99,9999% / 99,99%  
BFE/VFE-tester utförda av oberoende laboratorier
- Förpackning: Enstycksförpackade  
Avdelningsförpackning: 25 st, transportförpackning: 250 st
- LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter
- Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avdelningsförpackning
- Latexfri



## OBS!

- Byte rekommenderas var 24:e timme
- Byt fuktvärmväxlare vid tecken på obstruktion
- Endast för engångsbruk
- Humid-Vent® Filter Compact ska placeras mellan trakealtub och andnings slang.

## Kontraindikationer!

- Humid-Vent® Filter Compact ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
- Humid-Vent® Filter Compact ska inte användas i samband med aktiva befuktare eller vid nebulisering.
- Förfukta inte.



Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm

Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se), E-mail. [marknad@meteko.se](mailto:marknad@meteko.se)