

Tensocold® Pack

OMEDELBAR KYLNING

Tensocold® Pack är en engångsprodukt, lämplig för att ge lokal smärtlindring och effektiv kylterapi i upp till 30 minuter. Produkten innehåller karbamid med vatten förslutet i en inre påse. Produkten aktiveras genom att innerpåsen slås sönder och sedan skakas.

Snabb och enkel

- Kan användas omgående - behöver ej kylas eller frysas.
- Lätt att använda - bara att slå och skaka för att aktivera.
- Förblir aktiv upp till ca 30 minuter.

Avsedd användning

Vid hematom/blåmärken, stukningar, värmeslag, feber och trauma.

Bruksanvisning

1. Slå till påsen med en fast hand så innerpåsen med vatten går sönder.
2. Mixa blandningen för att få maximal kyla, använd tyg mellan hud och kylpåsen.
3. Engångsförpackning, kasseras efter användning.

Notera

- Endast för yttre bruk. Applicera inte direkt på sår.
- I händelse av cirkulatoriska sjukdomar eller hudkänslighet använd endast produkten efter medicinsk rådgivning.
- Om innehållet kommer i kontakt med ögonen eller hud skölj omedelbart med vatten i 15 minuter och kontakta en läkare. Om förtäring drick en 1/2 liter varmt vatten, framkalla inte kräkning, kontakta läkare.
- Använd endast påsen om den är helt förseglad. Öppna eller punktera inte förpackningen efter användning. Kassering enligt lokala föreskrifter.
- Förvaras torrt och svalt.

Material

Karbamid (urea) och vatten.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENHET

Tensocold® Pack			
Art nr.	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
47423-02	14,5 cm x 24 cm	1	24

