

DUSCHSTRUMPA

Även om man är gipsad eller bandagerad är det viktigt att ha god hygien

- Med Seal-Tight® duschstrumpa kan man enkelt duscha utan att man förstör gips eller lindor
- Mycket enklare än att använda plastpåse och tejp
- En elastisk gummiring försluter om benet så att inget vatten kommer in
- Tålig vinyl gör att vatten inte tränger genom skyddet
- Kan vid normal hantering användas dagligen i 6-8 veckor
- Användningsområde: För att skydda gips och lindor
- Latexfri

Material

Seal-Tight® duschstrumpa är tillverkad av kraftig, transparent vinyl. Strumpan är fäst i en plastring av hållfast polypropylen. Inuti ringen sitter en packning av syntetisk gummi med ett hål i mitten. Gummipackningen sluter tätt kring den arm eller det ben som ska skyddas från vatten.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Seal-Tight®				
Art nr.	Storlek	Längd	Antal/ fp	Antal/ trp
Vuxen				
72045-09	Underarm	56 cm	1	30
72045-07	Hel arm	99 cm	1	50
72045-10	Underben	59 cm	1	50
72045-08	Hel ben	107 cm	1	30
72045-11	Fot	28 m	1	50
Barn				
72045-01	Arm	46 cm	1	30
72045-02	Arm	71 cm	1	30
72045-04	Ben	46 cm	1	50
72045-05	Ben	79 cm	1	50

Bruksanvisning

- 1 Lyft med hjälp av tummar/fingrar innanför gummipackningen dusch-strumpan upp över gipset stegvis.
- 2 Lyft upp strumpan så långt som möjligt. För därefter tillbaka plastringen något, så att gummiringens innerkant pekar uppåt.
- 3 OBS! Tänk på att våt plast kan vara halkig i badkar och på golv. Använd gärna halkskydd.
- 4 Duscha av strumpan efter användning och låt droptorka.

