

Conveen[®] urindroppssamlare

Faktablad

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care



Funktionell och hudvänlig lösning

Urinläckage (inkontinens) kan vara alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) som är ansluten till en urinpåse är en funktionsduglig och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

PVC- &
ftalatfri

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Conveen urindroppssamlare är tillverkad av latex.

Conveen med häftremsa ger en enkel och hygienisk fixering. Den finns i olika storlekar med längden 105 mm. Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs. Conveen kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta. Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt. Bruksanvisning medföljer produktförpackningen och på hemsidan finns instruktionsfilm som steg för steg visar hur urindroppssamlare och urinuppsamlingspåse ska användas: coloplast.se/instruktionsfilmer.

Häftremsan är elastisk och dubbelhäftande och ger en säker fixering som hindrar läckage. Den är hudvänlig och lämnar inga häftrester vid borttagandet. Remsan ska appliceras omlott vid penisroten innan urindroppssamlaren rullas ut över penis och remsa.



Utloppets utformning fungerar som vridskydd och förhindrar därmed knickbildning som säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs. Anatomisk följsamhet gör att den sitter säkert på plats. Den är samtidigt hudvänlig och skonsam mot ollonet samt lätt och smärtfri att ta av. Inga häftrester lämnas. Passar på marknaden förekommande urinuppsamlingspåsar.

Conveen Urindroppssamlare är förpackad i en diskret styckförpackning som är lätt att öppna, enkel att ta med sig och som har tydlig och lättläst märkning.

Att välja urinuppsamlande system

Många män med urininkontinens använder fortfarande absorberande skydd.

Många urologer anser dock att ett uppsamlande system (urindroppssamlare kopplad till urinuppsamlingspåse) är ett bra alternativ till absorberande produkter med fördelar som bekvämlighet, hygien, skydd för kläder och möjlighet att hålla sig torr¹.

Detta har föranlett en ändring i EAU:s (European Association of Urology) riktlinjer kring urininkontinens. Uppsamlande produkter rekommenderas nu till män med urininkontinens (utan närvaro av signifikant residualurin). EAU säger även att en urindroppssamlare ska kunna appliceras självständigt och vara enkel att använda².

Val av urindroppssamlare är därför av största vikt. Kliniska studier visar att det skiljer sig mellan olika produkter vad gäller kvalitet³⁻⁴. Det finns ett överflöd av bevis som tyder på att personer med urininkontinens upplever en kraftigt minskad livskvalité jämfört med kontinenta individer i samma ålder och med samma hälsa⁵.

Referenser:

1. Chartier-Kastler E. How urinary sheaths benefit quality of life. *Nurs Times* 2011;107:20-22
2. Lucas MG, et al. Guidelines on Urinary Incontinence. *European Association of Urology*, 2013
3. Pemberton, P et al. A comparative study of two types of urinary sheath. *Nurs Times* 2006; 102:36-41 (Se s3-8 i denna pdf)
4. Fader M, et al. Sheaths for urinary incontinence: a randomized crossover trial. *BJU* 2001; 88:367-372
5. Ko Y, et al. The impact of urinary incontinence on quality of life in the elderly. *Am J Manag Care* 2005;11:S103-111

Artikelnummer, längd, antal och storlek etc

Conveen®	Omkrets (mm)	Diameter (mm)	Längd (mm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
Självhäftande med applikator	● 70	20	105	90	052120
	● 80	25	105	90	052000
	● 90	30	105	90	052050
	● 105	35	105	90	052100
	● 125	40	105	90	052150
Urindroppssamlare med häftstrip (kombipack)	● 70	20	105	30	051200
	● 80	25	105	30	051250
	● 90	30	105	30	051300
	● 105	35	105	30	051350
	● 125	40	105	30	051400
Häftstrip			113x16 mm	20	051001




Längden på häftytan på Conveen produkterna i tabellen ovan är 36 mm.

För att urindroppssamlaren ska uppfylla sitt syfte, är det viktigt att använda rätt storlek. Penis ska mätas vid penisroten i avslappnat tillstånd (stående eller liggandes på sidan).

Exempelvis kan Conveen mätsticka användas, som kan beställas kostnadsfritt från Coloplast kundservice 0300-332 99. Storlek och art nr representeras av en färg på mätstickan och i produktöversikten.

På www.coloplast.se/conveen finns även ett test som visar tänkbara kombinationer av urindroppssamlare och urinuppsamlingspåse.

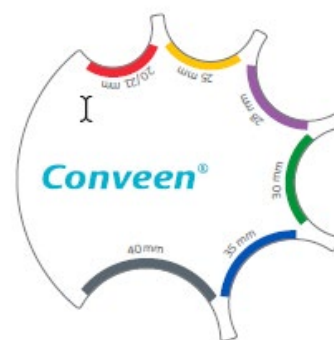

Innehåll

Conveen är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDD 93/42/EEC. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri. Conveen Security+ består huvudsakligen av polymermaterial.

Produkt Kombipack
Urindroppssamlare:
Latex, CAS 9006-04-6

Häftremsa:
Polyeten, 9002-88-4
Silikoniserat papper
Curagard

Produkt Självhäftande
Urindroppssamlare:
Latex, CAS 9006-04-06

Häftämnen
Kalciumnitrat
Högdensitetspolyeten – HDPE
Polypropylen PP Applikator

Produktförpackning
Polyetylen, PE, 9002-88-4

Avdelningsförpackning
100% jungfruligt material

Transportförpackning
100% återvunnet material

Avfallshantering och miljöpåverkan

Produkt:

Privat kan produkten slängas med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Följande avfallskod kan användas enligt europeiska avfallskatalogen (EWC) och EU-direktiv 75/442/EEC:

18 01 04 00 avfall som inte kräver särskilda åtgärder med tanke på förebyggande av infektion (tex förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor). Om infektionsrisk föreligger och produktavfallet behöver hanteras enligt särskilda krav ska andra avfallskoder användas. Ansvaret för klassificering ligger hos den som hanterar avfallet.

Baserat på toxikologiska data om produktmaterialet, bedöms inga ekotoxikologiska effekter uppstå. Produkten är inte biologiskt nedbrytbar, varför rekommendationen är att inte kasta den på soptippen. Eftersom produkten har varit i kontakt med kroppsvätskor (blod, urin, avföring) ska den inte återvinnas.

Vid förbränning under kontrollerade förhållanden bildas koldioxid (CO₂) och vatten (H₂O).

Förbränning alstrar energi och därför rekommenderas avfallsförbränning med energiutvinning. Okontrollerad och ofullständig förbränning kan leda till bildande av toxiska gaser, tex kolmonoxid (CO) och polyaromatiska kolväten (PAH).

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast nio fabriker är certifierade enligt ISO 14001.

Förpackning:

Coloplast rekommenderar att förpackningsmaterial i första hand går till återvinning och i andra hand till avfallsförbränning med energiutvinning pga att förbränning alstrar energi. Lokala avfallsregler ska följas.

Vid förbränning under kontrollerade förhållanden bildas koldioxid (CO₂) och vatten (H₂O). Okontrollerad och ofullständig förbränning kan leda till bildande av toxiska gaser, tex kolmonoxid (CO) och polyaromatiska kolväten (PAH).

Avdelnings- och transportförpackningar är med tiden biologiskt nedbrytbara.



Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).