


30 mars 2006

3M är känt för sina innovativa teknologier som erbjuder praktiska lösningar. 6658 är en stor uppsamlingspåse avsedd för abdominell kirurgi med hög användarvänlighet.

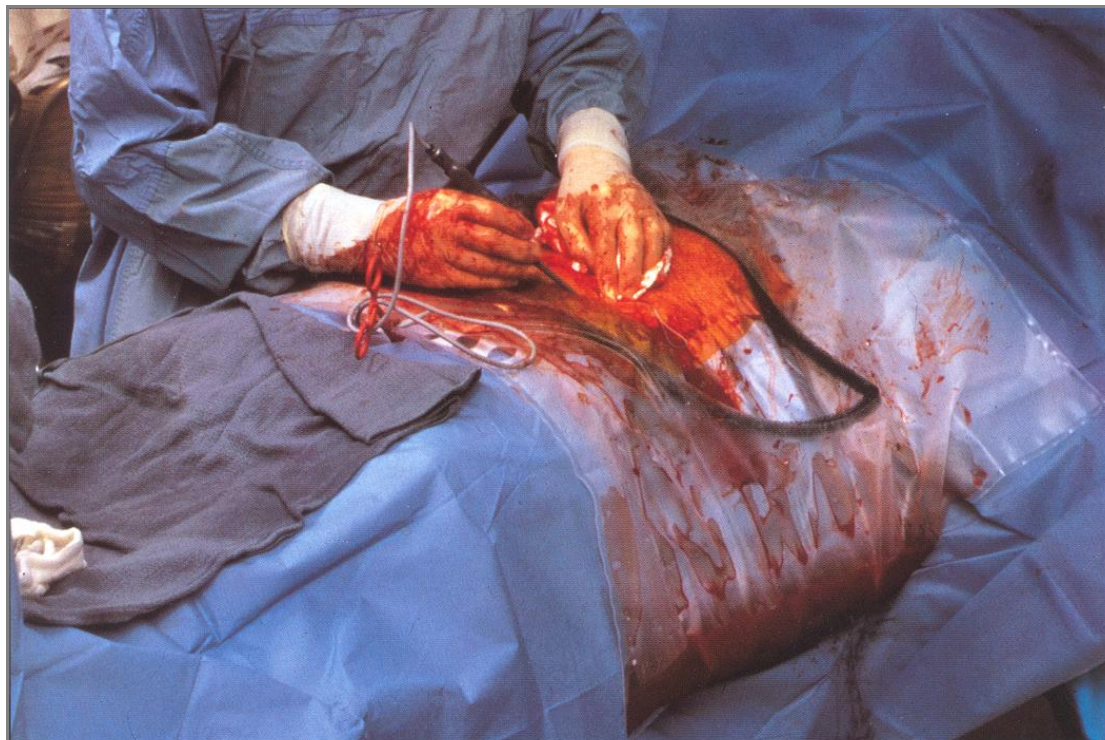

- anpassad för optimal vätskekontroll vid bukkirurgiska ingrepp
- minimerar därför smittriskerna med blod, kropps- och spolvätskor
- klar polyetylenfilm, ogenomträngligt material, förhindrar läckage på uppdukningen
- loban™ incisionsfilm ger en unik kontrollerad, kontinuerlig och jämn antimikrobiell effekt som kan förhindra rekolonisation* samt ger säker vidhäftning under hela ingreppet

Produkt Nr	Storlek	Antal/lev fp
6658	74 cm x 74 cm incisionyta 33 cm x 43 cm	20 st (5x4)

Applicering av 6658 Se bild 1-3 nedan



1. Ta bort linern
2. Applicera påsen: vik ut påsen mot huvud- och fotända. Vik sedan ut den åt sidorna
3. Stryk över incisionsområdet med steril operationstork för att säkerhetsställa vidhäftningen

*Ref: J Int Med Res 1986;14(2):105-9 The prevention of wound contamination by skin organisms by the pre-operative application of an iodophor impregnated plastic adhesive drape. Fairclough JA, Johnson D, Mackie I.