



SERRES SLUTNA SUGSYSTEM



Medioplast AB
Box 9504
200 39 Malmö

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com



Telefon: 040 671 23 00
Fax: 040 671 23 10
Kundtjänst: 020 78 80 35

Serres Sugpåsar



Serres slutna sugsystem är ett säkert och hygieniskt system, både för patient och användare . Det slutna sugsystemet kan användas till alla på marknaden vanligen förekommande sugkällor.

Serres sugpåsar ska användas tillsammans med Serres sugkanistrar som finns i storlekarna 1, 2 samt 3 Liter.

Sugpåsarna levereras tomma eller förfyllda med ett superabsorberande pulver som förtjockar den uppsugna vätskan. Det innebär en extra säkerhet vid hantering av avfallet.

På insidan av locket finns ett hydrofobt filter. Detta fungerar som överfyllnadsfilter och bakteriebarriär samt förhindrar backflöde till sugkällan.

Uppkopplingen är enkel. Med endast en koppling på locket till patientanslutningen minimeras risken för felkoppling. Kopplingen är av standardmodell och passar alla kopplingar och konor på marknaden.

Sugpåsarna är var och en individuellt testade vilket ger en 100% garanti för att produkterna alltid är av högsta kvalitet.

Inga speciella påsar krävs för seriekoppling. Serres sugpåsar kan användas både som singelkopplad och seriekopplad. Det ger en besparing av antal artiklar på avdelningen samt mindre skrymmande förpackningar.

Sugpåsarna är PVC Fria och latexfria. Påsarna kan förbrännas. Lokala föreskrifter finns för avfallshantering.

Serres Sugpåsar



Vilken påse passar till vilken kanister?

1 liter 6057308 (transparent),
6057309 (blå)
2 liter 6057328 (transparent),
6057329 (blå)
3 liter 6057348 (transparent)

Material:	Sugpåsen - Polyolefin, polyetylen och polypropylen Pulver - Superabsorberande Polymer
Specifikationer:	
Volym	1, 2 eller 3 Liter
Patientanslutning	12 mm
Övrigt	Kartonger av wellpapp, återvinningsbart
EN standard:	EN 980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp./Pall
6057157	Sugpåse 1 liter	36/216/3456
6057167	Sugpåse 2 liter	24/144/2304
6057187	Sugpåse 3 liter	24/144/2304
6057167-3	Sugpåse 2 liter med backventil	24/144/1152
6057187-3	Sugpåse 3 liter med backventil	24/144/1152
6057557	Sugpåse 1 liter med pulver i påse	32/192/3072
6057567-0	Sugpåse 2 liter med pulver i påse	22/132/2112
6057587-0	Sugpåse 3 liter med pulver i påse	20/120/1920
6057550	Pulver till sugpåse 25 g/påse	24/288
6057553	Pulver till sugpåse 2 kg/fp	1/1

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Tilläggsbeskrivning till Serres sugpåsar förfyllda med pulver



1. Avvikelser vid avläsning av volym

Vid avläsning av volymen i förfyllda sugpåsar är det viktigt att komma ihåg att pulvrets volym ska räknas bort vid avläsning enligt nedan:

Artikelnummer:	Beskrivning	Volym pulver	
6057557	1 liters påse	35 ml	pulver i påse
6057567 -0	2 liters påse	70 ml	pulver i påse
6057587-0	3 liters påse	105 ml	pulver i påse

Pulvret i sig expanderar inte.

2. Seriekoppling av förfyllda sugpåsar

Om Serres sugpåsar med pulver seriekopplas är det **mycket** viktigt att vacuumsugen är påslagen under hela den tid som sugen används.



Tilläggsbeskrivning till för Serres Sugpåsar med backventil

Vi kan nu erbjuda Serres sugpåsar med ett membran som utgör ett mekaniskt skydd mot överfyllnad eller eventuellt backflöde från påsen ut i slangen. Membranet är placerat på insidan av locket, vid patientkopplingen och är testat för att tåla ett vacuum mellan -15kPa -- -95kPa.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp./Pall
6057167-3	Sugpåse 2 liter med backventil	24/144/1152
6057187-3	Sugpåse 3 liter med backventil	24/144/1152

Kom ihåg: En backflödesventil kan aldrig användas som en kork. Förslut därför alltid patientporten med den avsedda korken.

Bra att veta: Sugpåsar med backventil kan användas i seriekoppling, men för att eliminera risken för backflöde, kom ihåg att alltid koppla ifrån påsarna enligt korrekt instruktion. Ta först av slangar anslutna till patientporten. Förslut patientporten med korken.

Stäng till allra sist av sugkällan.

SUGPÅSE:

Material sugpåse: Polyetylen, Polypropylen
Innehåller inte Latex eller PVC

Material membran: POM = Polyoxymethylene

Volym sugpåse: 2 L eller 3 L

EN standard: SFS-EN 980



Sampackat set med Serres sugpåse samt slang

Ett kostnadseffektivt och sampackat set som gör påse och slang lättillgänglig och lätt att montera vid vårdplatsen kring patienten. Setet innehåller en 1 liters eller 2 liters sugpåse med tillhörande slang i olika längd, DEHP-fri. Osteril


SLANG:

Material: PVC DEHP fri (ftalat fri)
 Diameter : 5,8 mm x 8,3 mm
 Koppling: Kona / Nippel
 K//N med vacuumkontroll med
 slidefunktion

ÖVRIGT: Kartong av wellpapp,
 återvinningsbart

SUGPÅSE:

Material: Polyolefin, polyetylen
 och polypropylen
 Volym: 1 liter
 Patientansl.: 12 mm
 EN standard: EN980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
605715723214-1	Set med sugpåse 1 l , DEHP-fri sugslang 2,1 m. Kona/Nippel med vacuumkontroll	60/60/480
605715723354-1	Set med sugpåse 1 l , DEHP-fri sugslang 3,5 m. Kona/Nippel med vacuumkontroll	50/50/400
605715723212-1	Set med sugpåse 1 l , DEHP-fri sugslang 2,1 m. Kona/Nippel	60/60/480
605716723214-1	Set med sugpåse 2 l , DEHP-fri sugslang 2,1 m. Kona/Nippel med vacuumkontroll	50/50/400
605716723354-1	Set med sugpåse 2 l , DEHP-fri sugslang 3,5 m. Kona/Nippel med vacuumkontroll	50/50/400
605755723218-1	Set med sugpåse med pulver, 1 l, DEHP-fri sugslang, 2,1 m. Kona/Kona/Nippel och adaptor med vacuumkontroll	60/60/480

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Flergångskanistrar



Kanistrarna är specialanpassade för Serres slutna sugsystem. En säker och enkel hantering minimerar risken för kontaminering. Det är viktigt att alltid använda rätt storlek på sugpåsen till rätt storlek på kanistern, 1 liter, 2 liter eller 3 liter. Kanistrarna samt vinkelkopplingarna kan diskas i 85°C, autoklaveras i 121°C.

Kanistrarna finns transparenta samt blåfärgade (1 L samt 2 L). Den färgade kanistern används då man ej önskar se färgen på innehållet i sugpåsen. Volymen kan dock avläsas då kanistern är transparent.

Material kanister:	Polycarbonat, termoplastisk elastomer
Specifikationer:	
Volym	1, 2 eller 3 Liter
Vacuumanslutning	14 mm
Övrigt	Polyeten plastpåse, kartonger av wellpapp, återvinningsbart
EN standard:	EN 980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057308	Kanister 1 liter, transparent	1/45
6057309	Kanister 1 liter, blå	1/45
6057328	Kanister 2 liter, transparent	1/24
6057329	Kanister 2 liter, blå	1/24
6057348	Kanister 3 liter, transparent	1/16

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Serres preparatuppsamlingsburk



Serres preparatuppsamlingsburk används tillsammans med Serres sugpåsar för uppsamling och säker transport av vävnadsprover. Preparat uppsamlingsburken är engångs, hygienförpackad.

Användning: Burken placeras ovanpå sugpåsens patientkoppling. Därefter ansluts patientslangens koppling till kopplingen på burken. När provtagningen är avslutad avlägsnas patient slangen ifrån burken och proppen sätts på. Burken avlägsnas ifrån sugpåsen. Vänd burken upp och ned och fyll med ex formalin genom öppningen på undersidan. Stäng öppningen med proppen.

Vid provtagning fastnar preparat med storlek större än 1 mm Ø i nätkorgen.

Material:	Polyetylen, polypropylen
Specifikationer:	
Volym	300 ml
Vinkelkoppling	12/7 mm
Övrigt	Polyeten plastpåse, kartonger av wellpapp, återvinningsbart
EN standard	EN 980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057247	Preparat uppsamlingsburk 300 ml	18/108

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Serres mätkopp/sugkanister för små volymer



Serres mätkopp/sugkanister används då exakt mätning av små volymer krävs t ex vid barnkirurgi. Mätkoppen skall användas tillsammans med Serres sugpåsar och kanistrar.

Användning: Slangen fästes mellan den vita kopplingen på mätkoppen samt den vita kopplingen på sugpåsen. Under sugbehandling suges vätskan upp i koppen. Volymen kan avläsas på koppens mätskala. Vätskan kan tömmas över i sugpåsen utan att slangen avlägsnas.

Material: Styren-akrylnitril (SAN), Polyetylen, Polypropylen
Slang Ethylenvinyl Acetat (EVA)

Specifikation:

Volym 250 ml
Patientanslutning 12 mm
Proppar 2 st
Slang 14,5 cm med vinkelkoppling Ø 7,2 mm
Exakthet < 50 ml +/- 10 ml - > 50 ml +/- 5 ml
Övrigt Polyeten plastpåse,
kartonger av wellpapp, återvinningsbart

EN standard EN 980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057257	Mätkopp/Sugkanister 250 ml	12/72

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Serres hållare för sugkatetrar



Rymmer cirka 10 sugkatetrar, kan hängas på skena.

Material: Polycarbonat och Polypropylene

Specifikation:

Höjd 40 cm
 Anslutning Samma som till Serres kanistrar, kan hängas på skena
 Rengöring Flergångs, tål disk 85° eller autoklav 121°

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057831	Hållare för sugkatetrar	1/1




Vacuumsiftesventil

Vacuumsiftesventil som passar i standardfäste. Kan monteras tillsammans med kanistrar på vagnen för att enkelt skifta vacuum mellan två olika kanistrar (eller serier av kanistrar)

Ventilen har fyra olika funktioner:

- Sugfunktion avstängd
- Sugfunktion för kanister A (eller serie av kanistrar).
- Sugfunktion för kanister B (eller serie av kanistrar).
- Sugfunktion samtidigt för både kanister A och B.

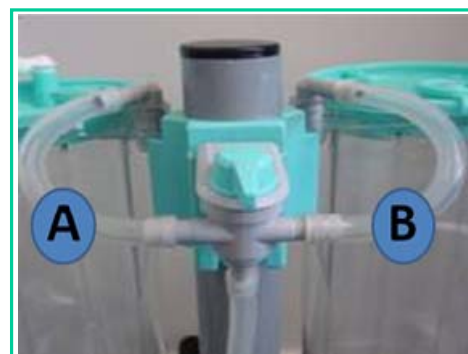

Material: POM (Polyoxymethylene) samt TPE (Thermoplastic elastomer)

Skötsel: Vacuumsiftesventilen är flergångs och kan torkas av på utsidan med etanolbaserade rengöringsmedel, men tål inte att förvaras i etanolbaserad lösning. Klorbaserade rengöringsmedel, disk i maskin +85°, eller autoklavering är INTE tillåten.

OBS: Efter desinfektion skall vacuumsiftesventilen alltid testas enligt beskrivningen på bruksanvisningen.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057955	Vacuumsiftesventil	5/5



Vagnar för Serres slutna sugsystem

Det finns följande vagnar:

- **Av rostfritt stål och aluminium.** Vagn för 3 kanistrar har 2 hjul.
- **Av stål och plast.** Vagn finns för 3 kanistrar som är låg. Denna får plats under en säng. Det finns även en vagn med en hållare för 6 kanistrar. Som tillbehör finns en extra hållare för ytterligare 6 kanistrar. Det finns två mindre fästen på vagnen för ex omkopplare för vacuum. Båda vagnarna har 5 hjul med broms på två av dessa.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057953	Vagn till 3 kanistrar, höjd 86 cm, aluminium, rostfritt stål	1/2
6057945	Vagn till 3 kanistrar, höjd 55 cm, rostfritt stål och plast	1/4
6057940	Vagn till 6 kanistrar, höjd 120 cm, rostfritt stål och plast	1/3



6057953

6057945

6057940

6057940+6075941

6057941	Hållare för 6 kanistrar, passar vagn med ref: 6057940	1/6
---------	---	-----



Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Seriekoppling



Slang för seriekoppling

Seriekopplings slang används när man kopplar två eller flera sugpåsar tillsammans med varandra för att uppnå en ökad kapacitet.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057908	Seriekopplings slang för vakuumanlutning, inkl nippel	10/10
6057918	Seriekopplings slang för sugpåse, inkl nippel	25/150
6057899	Silikonslang 5 m för seriekoppling av vacuumskiiftsventil ref. 6057956	1/10
6057621	Koppling, rak för patient	20/20

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning



Serres ejektorsug Q-Vac



Serres ejektorsug är liten, smidig och effektiv ejektorsug av metall. Med ett enkelt enhandsgrepp kan man både starta/stänga av ejektorn samt justera sugstyrkan.

Ejektorn finns både med snabbkoppling samt med 1,5 m slang för montering på skena. Den passar de flesta på marknaden förekommande anslutningar.

Som tillbehör till Q-Vac ejektorsug finns en ljuddämpare som enkelt monteras på ejektorn. Ljudnivån minskar då med 10 db. Sugstyrkan påverkas i jämförelse med ejektorn utan ljuddämpare från en kapacitet på 27 l/min till 23 l/min.

Teknisk specifikation:

Installation	Monteras på skena eller med snabbkoppling
Anslutning	Till tryckluftsutrustning
Ljudnivå	54 db/60 kPa
Flöde	27 l/min
Ljudnivå med ljuddämpare	44 db
Flöde med ljuddämpare	23 l/min
Maximalt negativt tryck	80 kPa
Levererat tryck	Min 4 bar, max 7 bar

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057966	Ejektorsug Q-Vac inkl 1,5 m slang för skena	1/1
6057967	Ejektorsug Q-Vac med snabbkoppling	1/1
6057969	Ljuddämpare för Q-Vac	1/1
6057978	Servicepack för Q-Vac	





Övriga tillbehör till Serres slutna sugsystem:

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057620	Grön dubbelkoppling. för anslutning av 2 sugslangar till samma sugpåse. OBS! Sugförmågan avtar något om båda slangarna är kopplade. Använd gärna klämman på den ena slangen för att öka sugförmågan.	20/100
6057618	Grå vinklad koppling för kanister, flergångs, kan diskas i 85°C.	20/20
6057958	Ventil för rökfilter, kan diskas i 85°C.	10/100



Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

Bakterie och Virus filter - fabrikat Air Safety limited

Ett hydrofobiskt filter som kopplas mellan Serres sugpåse och sugkällan då det krävs ett virusfilter. Fungerar även som ett överfyllnadsventil. Kan sitta max. 30 dagar eller bytes vid behov.

Specifikation: Styrolux[®], Porstorlek: 0,27 µm, Filterarea: 24,6 cm².
maxtryck 95kPa



Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057702	Bakterie och virusfilter	10/10

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning



Mediplast AB
Box 9504
200 39 Malmö

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com




Telefon: 040 671 23 00
Fax: 040 671 23 10
Kundtjänst: 020 78 80 35

Övriga tillbehör till Serres slutna sugsystem:

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057815	Kanisterhållare med snabbkoppling för skena 25-45 mm, plast	1/25
6057818	Kanisterhållare för skena 20-44 mm, aluminium	1/25
6057817	Kanisterhållare för väggfäste, aluminium inkl skruvar	1/25
6057830	Kanisterhållare med krokar för sängfäste, aluminium, rostfritt stål	1/10
6057835	Kanisterhållare för 1 liters kanister, aluminium, rostfritt stål	1/10

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning

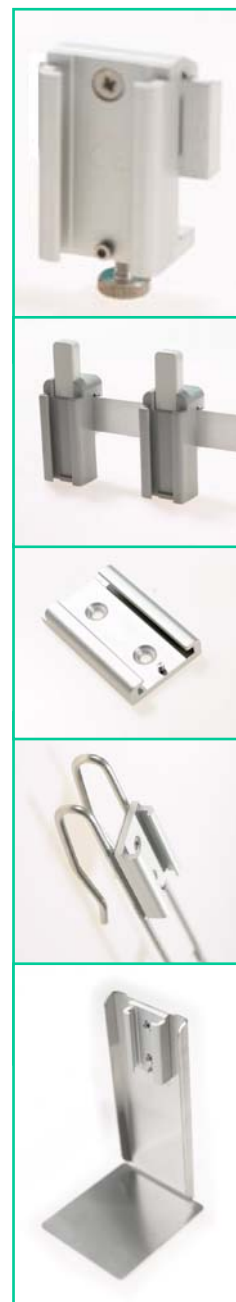

Övriga tillbehör till Serres slutna sugsystem:

Serres Rökfilter

Serres rökfilter bör användas då man använder laser och diatermi. Rökfiltret förbygger att det hydrofoba filtret i påsen blir mättat innan påsen är full.

Specifikation: Glasfiber, Porstorlek: 3 µm, Total filter area: 51 mm Ø.



Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057710	Rökfilter för laser/diatermi	10/10

Splash Vac Golvsug, för att suga upp överflödig vätska ifrån golvet inklusive sugslang 3 m. Material: Polystyren och Polyetylen.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057270	Splash-Vac golvsug inkl 3 m sugslang	25/100



Hållare för sugslang passar skena som är 10 - 12 mm i tjocklek. Material: Polypropylen – kan diskas i 85°C, autoklaveras i 135°C.

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057833	Hållare för sugslang	10/10

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning




Serres Sugslangar

Serres kan erbjuda er sugslangar som har en perfekt passform till Serres sugpåsar samt övriga sugpåsar på marknaden. Slangarna har en god elasticitet och hårdhet allt för att slangen ska vara så knickningsfri som möjligt.

Som nyhet finns slang med Kona – Nippel koppling med vacuumkontroll, en helt ny design för att underlätta arbetet för användaren. Vacuumkontrollen har en sk slidefunktion, en knapp som kan föras framåt eller bakåt för att stänga av respektive sätta på vacuumkontrollen.



Kona-Kona

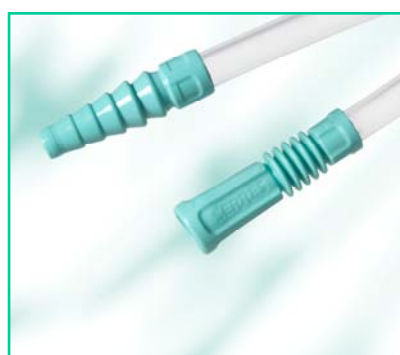

Kona-Nippel

Material: PVC samt DEHP fri slang (ftalatfri).


Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
------------	-------------	---------------

DEHP (di etyl hexyl phtalat) är ett mycket vanligt ämne som tillsätts till PVC för att göra plasten mjuk. Fr o m den 21 mars 2010 måste man enligt det Europeiska medicinska direktivet (MDD) uppge om en produkt innehåller detta ämne. För att tillgodose efterfrågan på DEHP fria produkter kan vi nu erbjuda ett utökat sortiment av sugslangar som fortfarande är smidiga utan att innehålla DEHP.

DEHP fri (ftalatfri) slang, steril

605813751-1	Sugslang kona/kona, 5,8 x 8,3 mm, 0,75 m	60
605813211-1	Sugslang kona/kona, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	60
605813351-1	Sugslang kona/kona, 5,8 x 8,3 mm, 3,5 m	50
605813212-1	Sugslang kona/nippel, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	60
605813352-1	Sugslang kona/nippel, 5,8 x 8,3 mm, 3,5 m	50

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
DEHP fri (ftalatfri) slang, steril, med vacuumkontroll		
605813214-1	Sugslang kona/nippel, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	60
605813354-1	Sugslang kona/nippel, 5,8 x 8,3 mm, 3,5 m	50
605813218-1	Sugslang kona/kona/nippeladaptor med vacuumkontroll, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	60
605813358-1	Sugslang kona/kona/nippeladaptor med vacuumkontroll, 5,8 x 8,3 mm, 3,5 m	50
DEHP fri (ftalatfri) slang, osteril		
605823213-1	Sugslang kona/kona/nippeladaptor, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	100
605823214-1	Sugslang kona/nippel med vacuumkontroll, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	100
PVC Sterila		
605813211	Sugslang kona/kona, 5,8 x 8,3 mm, 2,1 m	60
605813351	Sugslang kona/kona, 5,8 x 8,3 mm, 3,5 m	50
605816301	Sugslang kona/kona, 7 x 10 mm, 3 m	40

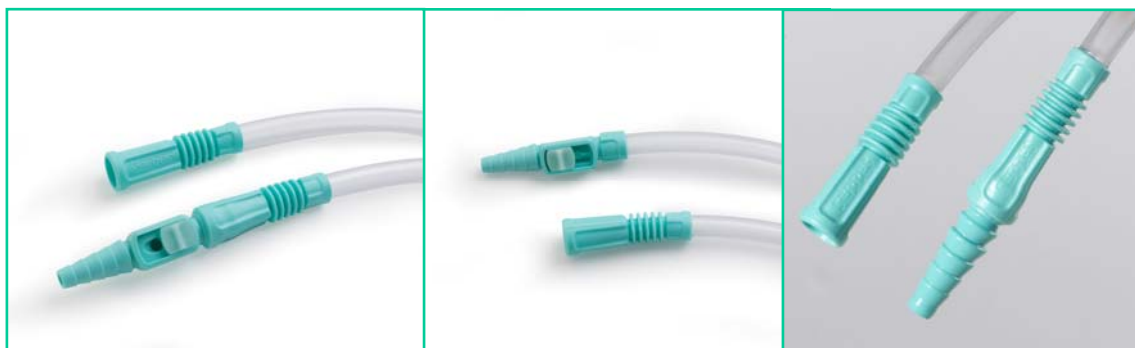

605813218-1, 605813358-1

605813214-1, 605813354-1
605823214,1

605823213-1



Serres Special sugslang

På Serres specialslang är innerdiameter på konan 8,5 mm Ø i jämförelse med standardslangarna (kona/kona) som har en innerdiameter på 11 mm Ø. Specialslangarna är särskilt lämpade för endoskopier eller när sughandstycke med smal fattning skall användas.



Material: DEHP-fri PVC

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
Specialslang för ex. endoskopier, steril		
605813217-1	Sugslang kona/kona, 6 x 8,5 mm, 2,1 m	60
605813357-1	Sugslang kona/kona, 6 x 8,5 mm, 3,5 m	50

Lös adaptor

Material: DEHP-fri PVC

6058280-1	Adaptor nippel/nippel med vacuumkontroll	100/800
-----------	--	---------

