


## Förband med antimikrobiell effekt



AQUACEL® Ag Hydrofiber® förband är ett antimikrobiellt förband med joniserad silver. AQUACEL Ag förband har en snabb och god absorptionsförmåga. Det joniserade silvret i förbandet har en antimikrobiell bred spektrum effekt mot kända sårpatogener, både aeroba och anaeroba bakterier, svamp och multiresistenta bakterier som t ex MRSA och VRE. AQUACEL Ag förband används för måttligt till kraftigt vätskande sår där målsättningen är att reducera bakteriefloran. Indikationer är infekterade sår eller sår med hög infektionsrisk.

**AQUACEL<sup>®</sup> Ag**  
Joniserad silver ger en bibehållande bakteriedödande effekt, och är lätt att avlägsna från såret utan att orsaka smärta.

**HYDROFIBER<sup>®</sup>-TEKNOLOGI**  
Hydrofiber med silver – en avancerad, högteknologisk fiber av ren, förädlad natriumcarboxymetylcellulosa med silverjoner som dödar bakterier.

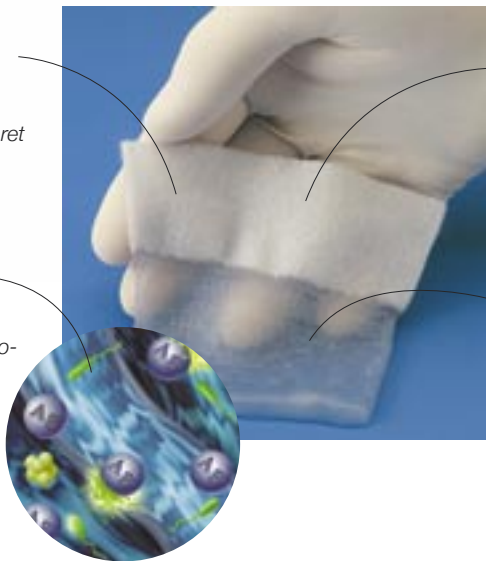

**ABSORPTION OCH RETENTION**  
Fibrerna omvandlas snabbt till en sammanhängande, antimikrobiell gel, med en unik förmåga att binda in och hålla kvar sårsekret.

**FÖRDELAKTIG SÅRLÄKNINGSMILJÖ**  
Sammanhängande gel som skapar en fuktig sårhelingsmiljö.

## EFFEKTIV ANTIMIKROBIELL BEHANDLING

AQUACEL<sup>®</sup> Ag förband är en helt ny typ antimikrobiellt förband som används vid behandling av infekterade sår eller sår där man önskar att reducera bakteriefloran för att förebygga infektion eller ge bättre förutsättningar för läkning. AQUACEL Ag hanterar och kontrollerar sårsekretionen och mindre blödningar.

## GOD KONTROLL ÖVER SÅRSEKRETET

AQUACEL Ag förband har liknande absorption- och bakteriebindande förmåga som AQUACEL<sup>®</sup> förband. Detta ger förlängda bytesintervaller, skapar en god sårhelingsmiljö och bidrar till att motverka maceration av sårkanterna.

## LÄTT ATT ANVÄNDA

AQUACEL Ag förband läggs direkt i såret med ett täckförband över. AQUACEL Ag används vanligtvis torr vid vätskande sår, men kan också förfuktas med steril, fysiologisk NaCl vid behandling av torra sår. Val av täckförband anpassas efter den kliniska situationen. Till exempel kan DuoDERM<sup>®</sup> Extra Thin förband och Versiva<sup>®</sup> förband användas eftersom de fixerar AQUACEL Ag effektivt och bibehåller en balanserad fuktig sårhelingsmiljö. På grund av den mjuka strukturen appliceras AQUACEL Ag lätt på sårytan och i kaviteter och områden som är svårbandagerade. Vid illaluktande sår kan CarboFlex<sup>®</sup> lukthämmande förband användas som täckförband.

### AQUACEL<sup>®</sup> Ag Hydrofiber<sup>®</sup> förband

| Storlek    | Förp | Bestnr | Int kod |
|------------|------|--------|---------|
| 5 x 5 cm   | 10   | 808733 | 403706  |
| 10 x 10 cm | 10   | 808734 | 403708  |
| 15 x 15 cm | 5    | 808735 | 403710  |
| 20 x 30 cm | 5    | 808736 | 403711  |

| AQUACEL <sup>®</sup> Ag Hydrofiber <sup>®</sup> band för kaviteter |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
| 2 x 45 cm  | 5 | 808737 | 403712 |

| AQUACEL <sup>®</sup> Ag Hydrofiber <sup>®</sup> postoperativa storlekar |    |        |        |
|---|----|--------|--------|
| 4 x 10 cm   | 10 | 810740 | 403739 |
| 4 x 20 cm   | 10 | 810741 | 403740 |
| 4 x 30 cm   | 10 | 810742 | 403741 |



## FAKTA

### AQUACEL<sup>®</sup> Ag HYDROFIBER<sup>®</sup> FÖRBAND

AQUACEL Ag är det enda antimikrobiella förbandet som har Hydrofiber<sup>®</sup> teknologins unika gelbildande egenskaper. Materialet består av natriumcarboxymetylcellulosa med 1,2% joniserad silver. Silverjoner i AQUACEL Ag finns tillgängliga i förbandet i antimikrobiell form under hela användningstiden.

AQUACEL Ag förband har en antimikrobiell bred spektrum effekt mot kända sårpatogener, inkl. multiresistenta bakterier som MRSA (Methicillinresistenta staphylococcus aureus) och VRE (Vancomycinresistenta enterococcer).

### INDIKATIONER

De flesta typer av vätskande sår, t ex. bensår, trycksår, diabetessår och akuta sår som t ex. skrubbsår, hudavskrapningar, tagställen och delhudsbrännskador (2 graden). Andra användningsområden är kirurgiska sår som ska sekundärläka, eller primärsuturerade kirurgiska sår med förväntad blödning.

### BYTESFREKVENS

AQUACEL Ag förband kan bytas med 1-7 dagars intervall beroende på mängd sekretion från såret och sårets kliniska tillstånd. Vid delhudsbrännskador där förbandet adhar sig på sårytan kan förbandet ligga på upp till 14 dagar.

### FÖRVARING

Förvaras torrt i rumstemperatur.

### STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserat.

### KLASSIFICERING

AQUACEL Ag är CE-märkt och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

### HÅLLBARHET

2 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen.