

Börja insamlingen på morgonen genom att kissa i toalettstolen. Skriv ner datum och klockslag på den bifogade etiketten (E).

1. Nästa gång kissar du i burken (B) och håller över i den bruna insamlingsbehållaren (A).
2. Töm därefter den lilla glasflaskan (D) i den bruna insamlingsbehållaren (A).



Den lilla glasflaskan innehåller 9 ml 20 % saltsyra

Irriterande för ögon, andningsorgan och hud.

Håll stängd och utom räckhåll för barn.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten och konsultera läkare.

I händelse av olycka eller illamående sök omedelbart medicinsk rådgivning (om möjligt visa denna etikett).

3. Stäng noga den bruna insamlingsbehållaren (A) och blanda väl. Fortsätt att samla urin, även i samband med tarmtömning, och håll över urinen i insamlingsbehållaren (A).
Stäng den bruna insamlingsbehållaren (A) och blanda väl efter varje påfyllning. Avsluta insamlingen nästa dag vid samma klockslag som du skrev på etiketten genom att kissa och fylla på insamlingsbehållaren. Nu är insamlingen avslutad.
4. Läs av den insamlade mängden urin från skalan på insamlingsbehållaren (A).
Skriv ner mängden på etiketten (E) och fyll även i övriga uppgifter på etiketten.
5. Blanda urinen i insamlingsbehållaren (A) och håll över lite i burken (B).
6. Fyll det vita röret (C) till 30 ml-markeringen med urin.
Töm ut övrig urin från burken (B) och insamlingsbehållaren (A) i toaletten.
7. Skruva på locket på röret (C). Sätt på etiketten (E) på röret (C). Lämna röret till din läkare.
Alla delar i urinuppsamlings-setet kan slängas som hushållssopor.

(A): Brun insamlingsbehållare (B): Burk (C): Rör, 30 ml
(D): Glasflaska med 20 % saltsyra, 9 ml (E): Etikett till röret

Endast för in-vitro diagnostik / Förvara i rumstemperatur

