


## BESKRIVNING OCH HANDHAVANDE

## Copan E-Swab provtagningsset

Art nr	Copan E-swab provtagningsset	Fp storl	Färgkod	Provtagnings- område	"Capture Cap Feature" *
480CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "regular" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Rosa	Näsa, svalg, vagina, rectum, faces och sår	Ja
481CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "minitip" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Orange	Öga, öra, näs- håla, svalg, urogenital provtagning	Nej
482CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "Nasopharynx" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Blå	Nasopharynx och pediatrik provtagning	Nej
483CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "uretha" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Orange	Urogenital provtagning	Nej
484CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "uretha" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Blå	Pediatrik provtagning	Nej

\* Capture Cap Feature innebär att provtagningspinnen fastnar i korken när korken skruvas åt, se beskrivning nedan.

## Handhavande

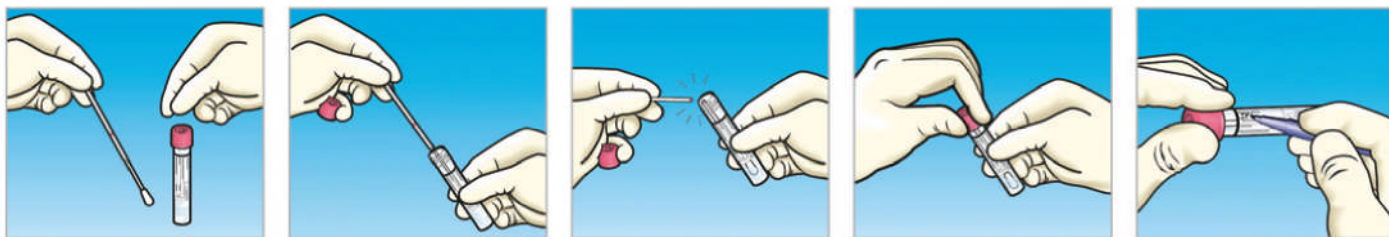

## Så här fungerar Capture Cap Feature

