

DuoDERM® Hydrogel

Beskrivning: DuoDERM® Hydrogel är en klar, viskös hydrogel utan konserveringsmedel som innehåller hydrokolloider (pektin och natriumkarboximetylcellulosa) och propylenglykol.

DuoDERM® Hydrogel ger en vätske-/fuktbalans i såret, antingen genom att absorbera eller avge vätska. En fuktig miljö stöder autolytisk debridering av fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad.

Indikation: DuoDERM® Hydrogel är särskilt utformad och indikerad för hantering av torra och nekrotiska sår med fibrin och nekrotisk vävnad. Den kan användas på både ytliga och djupa sår.

Användning: Använd det medföljande sterila munstycket för enkel och exakt applicering direkt i såret upp till kanten mot den omkringliggande huden och täck med ett lämpligt fuktbevarande förband som DuoDERM®-förband. Vid nekrotiska sår och fibrinbelagda sår kan DuoDERM Hydrogel få vara kvar kvar i upp till 3 dagar. På sår med ren och granulerande vävnad kan gelen få sitta kvar i upp till 7 dagar.

Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr	CvT-kod
DuoDERM® Hydrogel	Tub med 15 g	10 st	401802	842997

