

# Infusionsaggregat



## Luftat infusionsaggregat L 86



**Luftat infusionsaggregat för användning till infusionsflaska eller påse. Insticksspetsen är speciellt utformad för enkel penetration av gummi-/plastmembran**

Infusionsaggregat L 86 är specialtillverkat för att passa till infusionslösningar i behållare av rigid plast eller glasflaska.

Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med 320 cm slang, med inbyggd R-lock backventil, för infusionspump, med integrerad 3-vägskran, med mikrodropp 60 dr/ml samt som PVC-fritt alternativ.


Patenterad droppregulator ger en säker och konstant dropptakt.

CODAN's över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

# Infusionsaggregat



## Luftat infusionsaggregat L 86

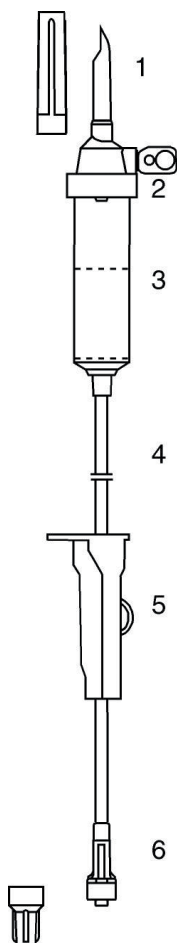

1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insida. Insticksspets speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran
2. Luftning med integrerat hydrofob bakteriefilter 0,2 $\mu$ . Luckan skall stängas då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionspåse av plast
3. Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp aquadest = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm<sup>2</sup> verksam filteryta och exakt maskvidd på 15 $\mu$
4. Slang av transparent PVC alternativt SRT, 175 cm Ø 3,0 x 4,1 mm.  
Fyllnadsvolym: 12,37 ml, 175 cm slang 22,62 ml, 320 cm slang
5. Droppregulator (blå) - patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximalt +/-7% avvikelse för PVC-aggregat respektive maximalt +/-10% för PVC-fria aggregat
6. Roterbar luer-lock, Rullock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage, säkerställer steriliteten av aggregatets insida och förhindrar kontamination av luer-lockkopplingen

### Steriliseringmetod

EO

### EN standarder

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-4, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
434437	<b>med 175 cm slang</b> Inf agg L86 m Flowstop NoDEHP	100	400	3600	J	N	S	TOTM
434438	<b>med 320 cm slang</b> Inf agg L86 3,2m slang m Flowstop NoDEHP	80	320	2880	J	N	S	TOTM
434443	<b>för Homecare</b> Inf agg L86 m Flowstop, 20-pack NoDEHP	20	160	1920	J	N	S	TOTM
434445	Inf agg L86 3,2m slang m Flowstop, 10-pack NoDEHP	10	80	960	J	N	S	TOTM