

Specialaggregat



Mix-Ad Set blandningsaggregat för antibiotika




Aerosol- och kontaminationsfri överföring av läkemedel enligt dokumenterad undersökning av chefsapotekare J Christensen, Huddinge farmaceutiska avdelning.

Mix-Ad Set är ett säkert system för beredning och administrering av antibiotika och cytostatika. Enkel och säker blandning i samma enhet förhindrar spill. Förhindrar exponering och kontaktallergier hos personal (dokumenterad undersökning). För blandning och överföring av torrs substans eller färdigblandad lösning från ampull till infusionspåse. Möjliggör intermittent infusion för att minimera risken för kemiska tromboflebiter. Patenterad droppregulator ger en säker och konstant dropptakt. Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen. Finns även som PVC-fritt alternativ.

CODAN's över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Mix-Ad Set blandningsaggregat för antibiotika

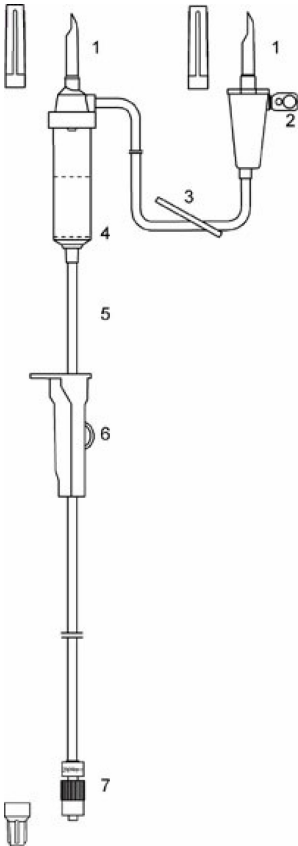

1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insida. Insticksspets speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran
2. Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2 μ . Luckan skall vara stängd när inte luftning av flaskan behövs.
3. Skjutklämma (vit) öppnas för att låta vätska rinna över i läkemedelsampullen. Stängs när läkemedelsampullens innehåll tömts över i infusionspåsen.
4. Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakt. Vätskefilter med 176 mm² verksam filteryta och exakt maskvidd 15 μ
5. Slang av transparent PVC alternativt SRT, \varnothing 3,0x4,1 mm
6. Droppregulator (blå) - patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximal avvikelse +/- 10%
7. Roterbar luer-lock, Rullock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage, säkerställer steriliteten av aggregatets insida och förhindrar kontamination av luer-lock kopplingen

Bruksanvisning

Utförlig bruksanvisning kan rekvireras från CODAN Triplus AB, Tel: 0300-356 60

EN standarder

DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Filtret möter kraven i klass P3, EN standard 143

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
Blandningsaggregat för antibiotika och cytostatika								
251068	Mono-Set blandningsagg m Flowstop NoDEHP	100	400	3200	J	N	S	TOTM
763057	Quadro-Set fyrgrenat blandningsagg NoDEHP	15	120	960	J	N	S	TOTM
Blandningsaggregat för antibiotika och cytostatika Greenline								
254800	Mono-Set blandningsagg green line m Flowstop		80	2880	J	J	S	NEJ
254804	Mono-Set blandningsagg green line m SWAN 3-v kran		80	2880	J	J	S	NEJ
254806	Duo-Set 2-grenat blandningsaggregat green line		15	945	J	J	S	NEJ
764807	Quadro-Set green line fyrgrenat blandningsagg	15	120	960	J	J	S	NEJ
Blandningsaggregat för antiobiotika i stamlösning								
251069	Mono-Set blandningsagg f stamlösning NoDEHP	20	160	1280	J	N	S	TOTM
Blandningsaggregat för antibiotika i stamlösning Greenline								
254802	Mono-Set blandningsagg green line f stamlösning		20	1280	J	J	S	NEJ
254805	Mono-Set blanddag green line SWAN 3-v kran stamlösn		20	1260	J	J	S	NEJ