


# Sorbact® Compress

## Bakterie- och svampbindande sårförband

- ✓ Förebygger och behandlar sårinfektioner
- ✓ Avlägsnar bakterier, svamp och endotoxiner på ett säkert sätt
- ✓ Effektiv mot de vanligaste resistenta patogenerna<sup>1</sup>
- ✓ Kan klippas till lämplig storlek och form
- ✓ Kan användas vid NPWT-behandling

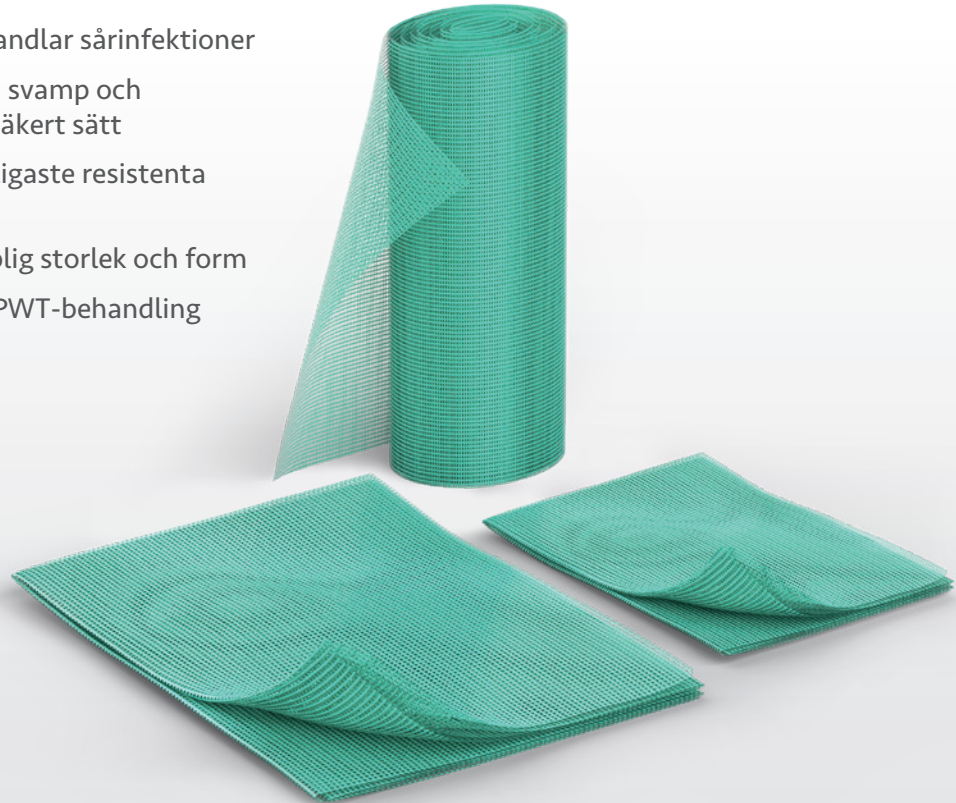

## Minskar den mikrobiella belastningen i ytliga sår och kaviteter

Sorbact® Compress är ett DACC™ impregnerat, icke-absorberande bakterie- och svampbindande sårkontaktlager, baserat på Sorbact® Technology, som låter sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Sorbact® Compress kan även användas i samband med NPWT-behandling som sårkontaktlager eller som sårfillare. Sorbact® Compress förebygger och behandlar sårinfektioner och underlättar sårhelingsprocessen.

## Avsedd användning

Sorbact® Compress är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Compress kan användas på både ytliga och djupa sår.

## Bruksanvisning




1. Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet kan vecklas ut till lämplig storlek och får överlappa sårkanterna om så krävs.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Riv inte isär förbandet. Kassera oanvänt förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan, för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. Vid djupa sår, veckla ut och fluffa upp

ett eller flera förband och fyll såret. Undvik att packa tätt. Förbandet kan också användas som sårkontaktlager.

6. Applicera ett sekundärförband som är lämpligt för mängden exsudat t.ex. ett skumförband, en absorberande dyna eller ett gelande fiberförband, och fixera.
7. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till 7 dagar.  
Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårhälingen störs.

Sorbact® Compress kan användas i samband med kompressionsbehandling. Sorbact® Compress kan användas i samband med NPWT-behandling. Följ instruktionerna för användning av NPWT-systemet.

Sorbact® Compress är MRI-säker. Ta bort Sorbact® Compress före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

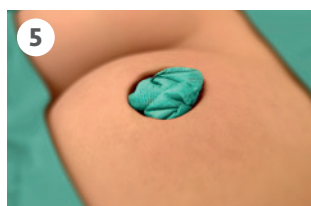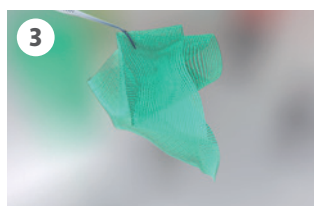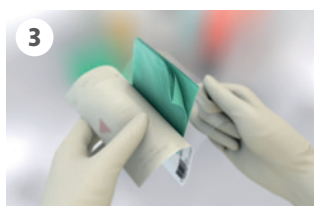

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

## Sorbact® Compress

Art. nr.	Storlek	Storlek utvikt	St./frp.
98128	4 x 6 cm	11 x 15 cm	40
98125	7 x 9 cm	17 x 28 cm	40
98124	Roll	10 x 100 cm	10



1. Husmark J, Avidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA 2020. EP006.

## Läs mer på [sorbact.se](http://sorbact.se)

Sorbact® Technology är en unik innovation som används i våra avancerade sårbehandlingsprodukter för att förebygga och behandla sårinfektioner. Produkter med Sorbact® Technology hjälper patienter i mer än 65 länder under varumärkena Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® och Cutimed® Sorbion® Sorbact®.